



AM-KM

МЯГКИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ОРТЕЗ ШЕИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Воротник ортопедический типа Schanzka AM-KM выполнен из полиуретановой пены и покрыт хлопковым ортопедическим трикотажем. Застёгивается при помощи ленты VELCRO, служащей для регулирования обхвата шеи.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОСОБЕННОСТИ

Стабилизирует и разгружает позвоночник в шейном отделе, разгружает мышцы шеи. Показания и период применения в зависимости от назначения лечащего врача

ПОКАЗАНИЯ

- После перенесенных травм шейного отдела позвоночника (вывиха, ушиба).
- В периоде реабилитации после переломов шейного отдела, операций, смещения шейных позвонков
- при острых и длительных болях в области шей и плеч вызванных травмой, перегрузкой или дегенеративными изменениями
- при дегенеративных изменениях шейного отдела позвоночника объединенных с неврологическими симптомами (шейный радикулит, парестезии верхних конечностей, сотрясения головы и нарушения чувства равновесия)
- при головных болях и шуме в ушах
- при кривошеи вызванной разными причинами

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Слишком тесное заложение ортеза может привести к усилению болей, слишком свободное провоцирует недостаточный лечебный эффект.

Чувство удушья и дискомфорт, усиление болезненных симптомов может значительно ограничить или даже помешать применению ортеза (особенно у людей с гипертрофией щитовидной железы, при значительной полноте, при усиленных невротических нарушениях)-необходимо согласовать лечение с врачом.

Нужно особенно контролировать правильность применения ортеза в соответствии с рекомендациями у детей, людей с нарушениями памяти, психически больных. В случае изменений кожи в месте прилегания (нарушения эпидермиса, ранения, кожных экзем) применение ортеза ограничено - возможно после наложения повязки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Исключительно правильно подобранный, подогнанный и примененный в соответствии с рекомендациями лечащего врача ортез исполняет заложенную функцию - инструктаж заложения предоставляет лечащий врач или квалифицированный техник-реабилитант.

Во время применения ортеза как фиксирующей повязки любые изменения регуляции должны быть согласовывать с лечащим врачом. Не разрешено самостоятельное снятие ортеза - возможное исключительно небольшое ослабление или передвигание поясов.

В первоначальном периоде использования, при высокой температуре окружающей среды и у людей с нарушениями чувствительности необходим частый контроль состояния кожи в месте прилегания ортеза. Продолжительное применение ортеза может привести к утрате мышечной массы. Рекомендовано систематическое выполнение упражнений, которые подбираются индивидуально для данного пациента ортопедом или техником реабилитации. При длительном применении полагаться ограничивать время использования до необходимого минимума в течении суток. Кожа в месте прилегания ортеза должна быть чистой (не следует применять мазей, кремов, лечебных компрессов непосредственно перед заложением) Неправильная консервация изделия - нетщательная стирка и полоскание может привести к возникновению кожных изменений связанных с усиленной потливостью под ортезом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Стирать вручную в теплой воде с добавлением мыла в температуре 30 градусов
Не гладить.
Не использовать хлорсодержащих отбеливателей
Сушить вдали от источников тепла.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 - удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG.
Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556
Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

© 2011



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

