

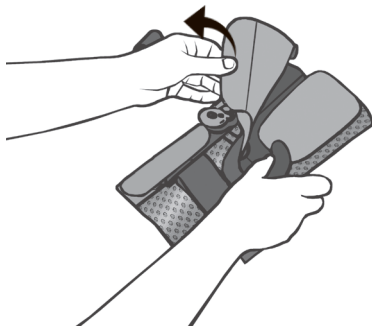
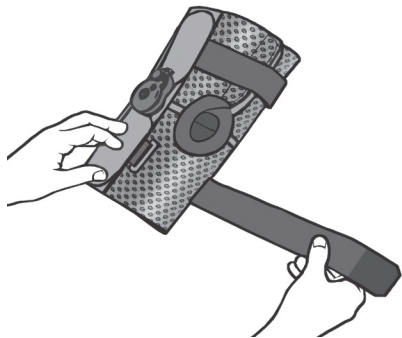




KOD KATALOGOWY	AM-DOSK-Z/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-DOSK-Z/1R
CODE	AM-DOSK-Z/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-DOSK-Z/1R

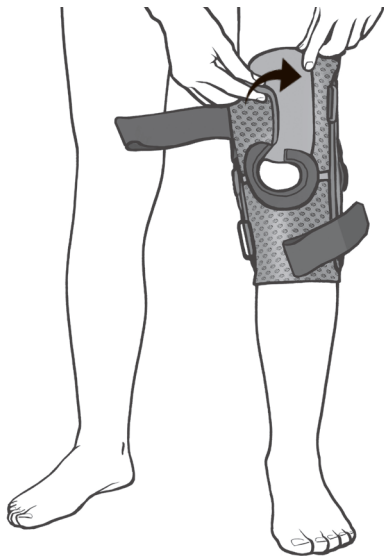



1. **PL:** Wypeść paski z klamerek i rozepnij górną część ortezy.
EN: Remove the straps from the buckles and unfasten the upper part of the orthosis.

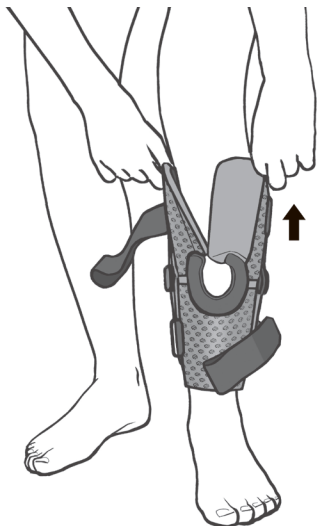

2. **PL:** Podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w pierścieniu okołorzepkowym i zapnij górną część ortezy.
EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut.

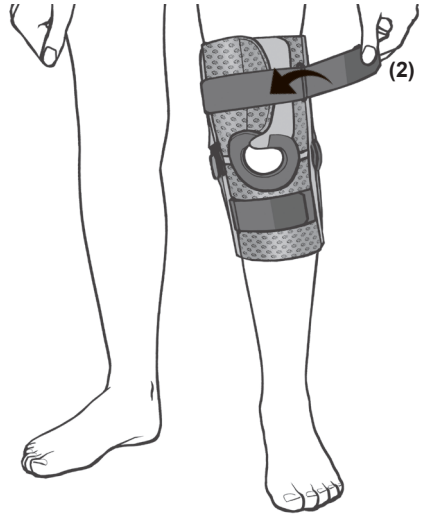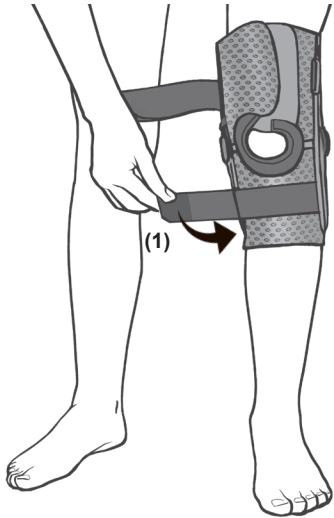

- 3. PL:** Przepleć dolny pasek przez klamerkę i zapnij na rzep (1). Zapnij tak samo pasek górny (2).
EN: Interlace the lower strap through the buckle and fasten with Velcro (1). Fasten the upper strap (2) in the same way.

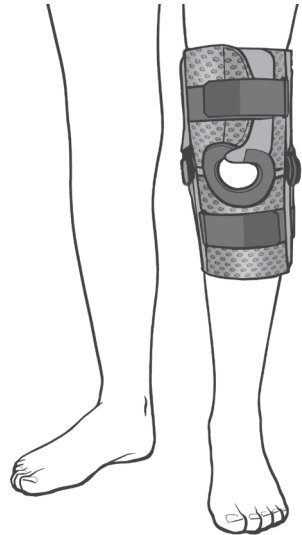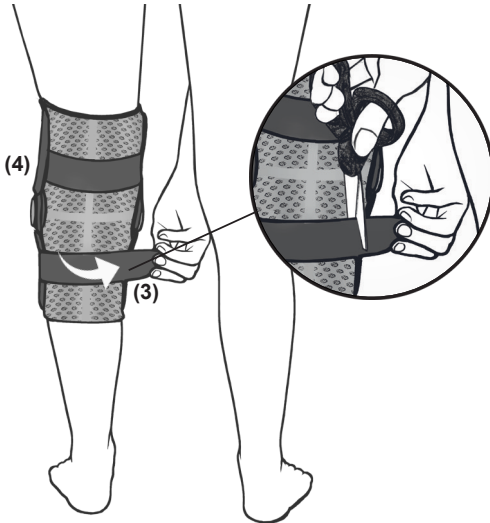

- 4. PL:** Zapnij taśmy na rzep (3 i 4). Jeśli jest taka potrzeba odetnij zbędną długość taśm.
EN: Fasten the tapes with Velcro (3 and 4). Cut the needless part of tapes off if you need.

- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.