


| | |
|----------------|-------------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-OSN-U-06 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA NADGARSTKA |
| MODEL | ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-06 |
| CODE | AM-OSN-U-06 |
| TRADE NAME | WRIST ORTHOSIS |
| MODEL | WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-06 |




- 1. PL:** Wypleć paski z klamerek.
EN: Remove the straps from the buckles.



- 2. PL:** Przyłóż ortezę do ręki.
Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.
EN: Place the orthosis on your hand.
Attention! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

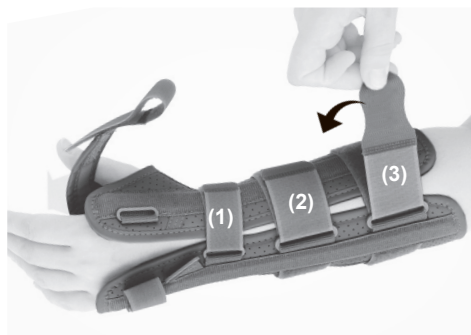

- 3. PL:** Przepleć paski przez klamerki i zapnij na rzepy według podanej kolejności (1,2,3).
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten with Velcros according to the following steps (1,2,3).

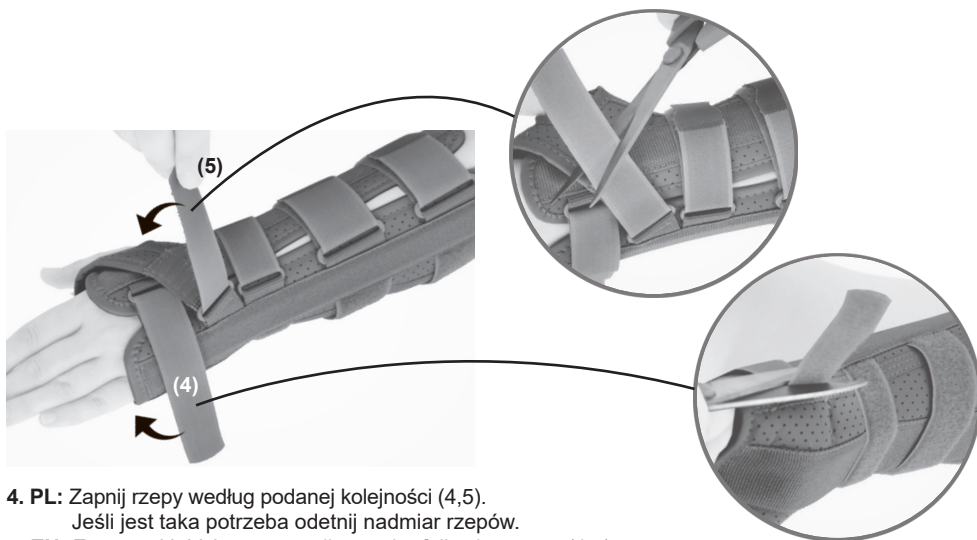

4. PL: Zapnij rzepy według podanej kolejności (4,5).
Jeśli jest taka potrzeba odetnij nadmiar rzepów.

EN: Fasten with Velcros according to the following steps (4,5).
If necessary, cut off any excess Velcro.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.