


KOD KATALOGOWY	AM-SN-LM
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-SN-LM
CODE	AM-SN-LM
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-SN-LM



- A. Orteza / Brace
- B. Osłona palców / Finger cover
- C. Temblak / Sling


2. **PL:** Połóż rękę na ortezie (A) i ustaw separator palców (1) w odpowiednim miejscu.
- EN:** Place your hand on the orthosis (A) and set the finger separator (1) in the right place.

1. **PL:** Rozepnij orteżę.
- EN:** Unfasten the brace.

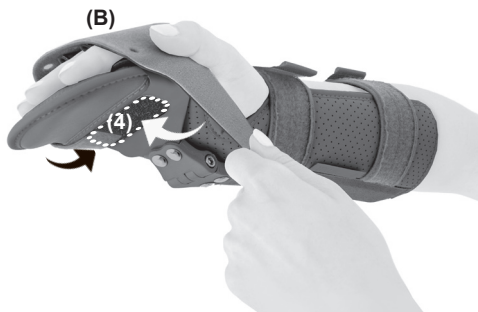


3. **PL:** Zapnij taśmy obwodowe (2,3) w podanej kolejności na rzepy.
- EN:** Fasten the circumferential tapes (2,3) in the given order with the Velcro fasteners.

4. **PL:** Przypnij osłonę palców (B) do rzepa (4) oplatając nią palce.
- EN:** Attach the finger cover (B) to the Velcro (4) and wrap it around your fingers.

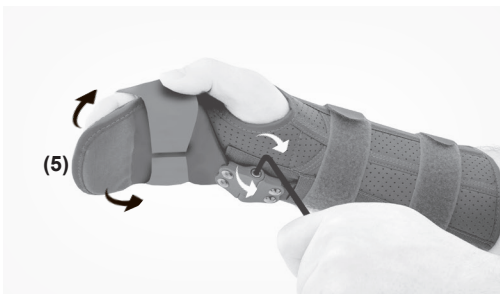


**5. PL:** Za pomocą kluczyka imbusowego ustaw odpowiednią pozycję dłoni (5).

**EN:** Adjust the required hand position with the Allen key (5).

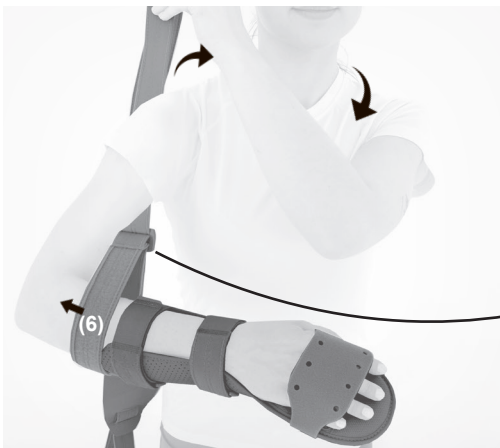


**6. PL:** Załóż pętelkę tembla na przedramię (6) i przełóż pasek przez ramię.

**EN:** Place the sling loop on your forearm (6) and the strap over your shoulder.

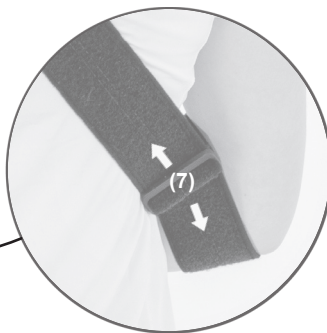


**7. PL:** Przy pomocy regulatora (7) dopasuj pętelkę tembla do obwodu przedramienia.

**EN:** Using the a regulator (7), fit the loop of the sling to the circumference of the forearm.

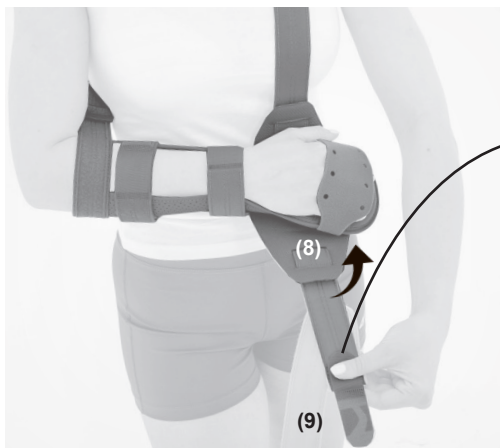


**8. PL:** Połóż rękę na elemencie termoformowanym tembla (8) i zapnij taśmę na rzep (9).

**EN:** Place your hand on the thermoformed part of the sling (8) and close the Velcro tape (9).

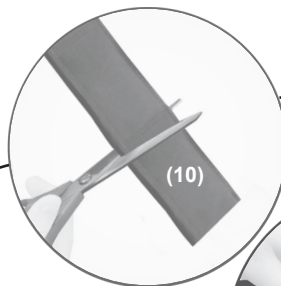

**9. PL:** Jeśli jest potrzeba, odetnij zbędną długość taśmy (10). Dopnij rzep (11) do paska i zapnij go.

**EN:** If necessary, cut off any unnecessary length of tape (10). Attach the Velcro (11) to the strap and close it.

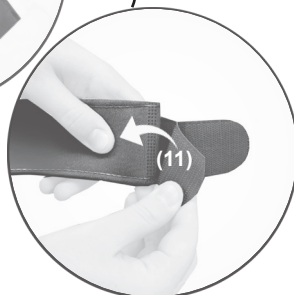



**10. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.