
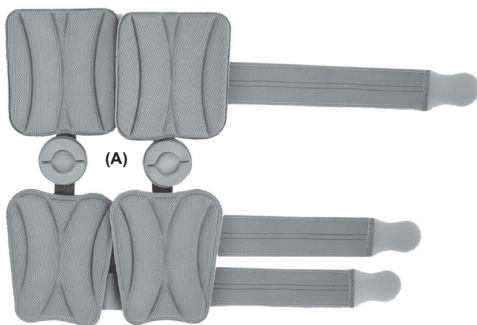



KOD KATALOGOWY	AM-KG-AR/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	AM-KG-AR/1R
CODE	AM-KG-AR/1R
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	AM-KG-AR/1R

PL: A. Orteza
B. Temblak

EN: A. Brace
B. Sling


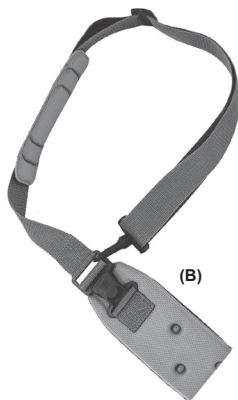


1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

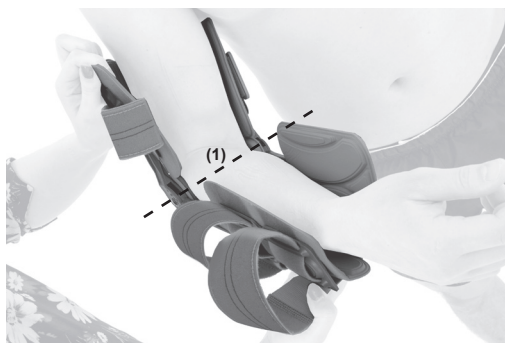


2. PL: Załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby zegary szyny znajdowały się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej (1).

EN: Place the orthosis on the upper limb, to keep the drop lock on the lateral epicondyle (1).

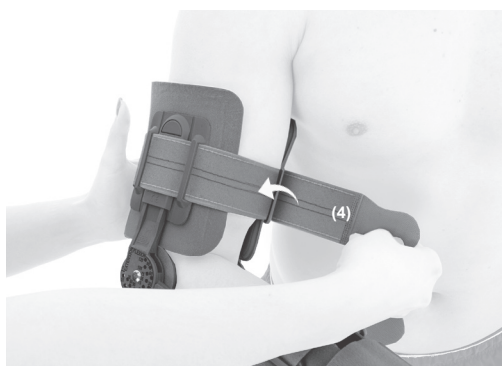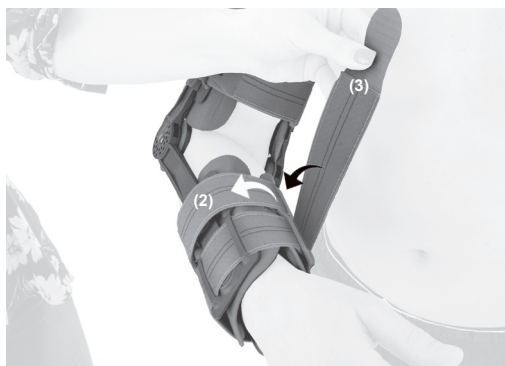



3. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij rzepy według podanej kolejności (2,3,4).

EN: Interlace the straps through the buckle and fasten the Velcro closures according to the following steps (2,3,4).

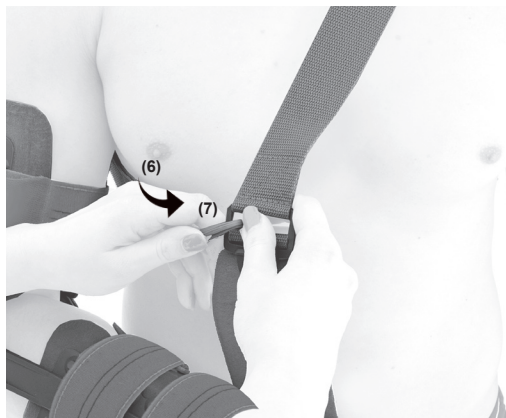


4. PL: Przelóż pasek przez ramię i ustaw osłonę szyi w odpowiednim miejscu (5). Następnie przelóż pasek według wskazanego kierunku (6) i zapnij klamerkę(7).

EN: Pass the strap over your forearm and set the neck cover in the required place (5). Then pass the strap in the direction shown (6) and fasten the buckle (7).

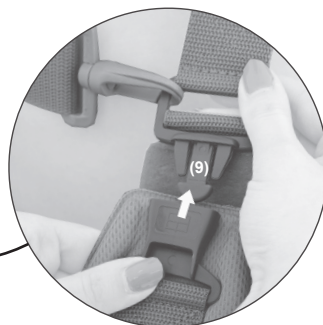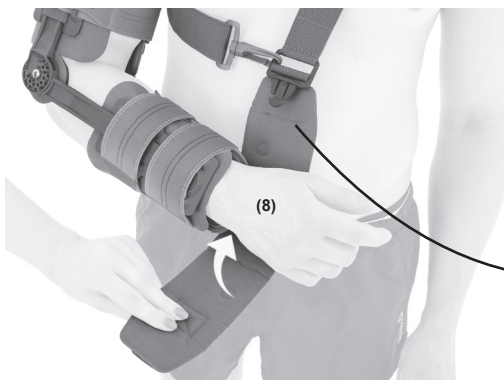

5. PL: Przyłóż rękę do temblaka (8) i zapnij klamerę (9).

EN: Place your wrist in a sling (8) and fasten the buckle (9).

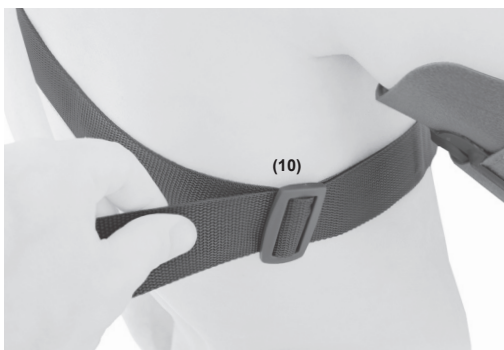

6. PL: Za pomocą regulatora ustaw odpowiednią długość taśmy (10).

EN: Use the adjuster to set the length of the tape (10).



7. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.