

KOD KATALOGOWY	AM-KG-AM/1RE
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-KG-AM/1RE
CODE	AM-KG-AM/1RE
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-KG-AM/1RE

## PL: TRZY STOPNIE STABILIZACJI. EN: THREE LEVELS OF STABILIZATION.



**1. PL: STABILIZACJA MOCNA**  
**EN: HIGH STABILIZATION**



**2. PL: STABILIZACJA ŚREDNIA**  
**EN: MID STABILIZATION**




**3. PL: STABILIZACJA SŁABA**  
**EN: LOW STABILIZATION**

### AD.1.


**PL: STABILIZACJA MOCNA**  
**EN: HIGH STABILIZATION**




- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby zegar szyny znajdował się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej.  
**EN:** Place the orthosis on the upper limb but remember to place the drop-lock on the lateral epicondyle.

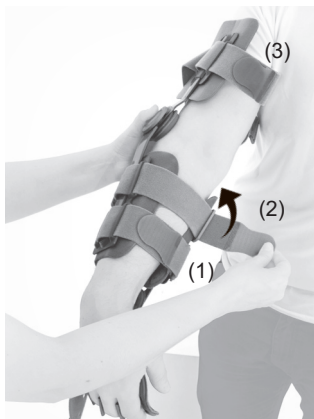

- 2. PL:** Zapnij rzepy według podanej kolejności (1,2,3).  
**EN:** Fasten the Velcro closures according to the following steps (1,2,3).

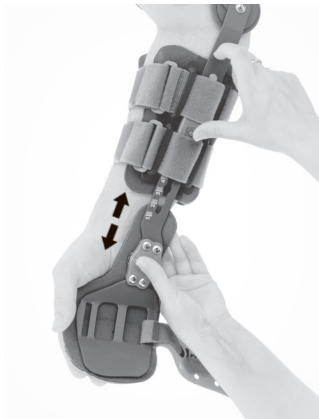

- 3. PL:** Ustaw odpowiednią długość łyżki dłoniowej.  
**EN:** Adjust the required length of the splint.

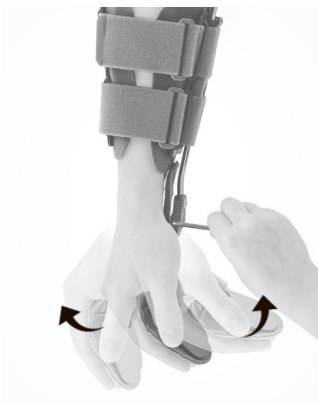

- 4. PL:** Za pomocą kluczyka ustaw odpowiednią pozycję dłoni.  
**EN:** Adjust the required hand position with the Allen key.



- 5. PL:** Zapnij osłonę palców.  
**EN:** Attach the finger strap.



- 6. PL:** Przełóż pasek przez ramię i zapnij karabińczyk.  
**EN:** Place the belt through the shoulder and fasten the clasp.



- 7. PL:** Zapnij karabińczyk.  
**EN:** Fasten the clasp.



- 8. PL:** Przyłóż rękę do tembla i zapnij klamrę.  
**EN:** Place your wrist in a sling and fasten the buckle.



- 9. PL:** Za pomocą regulatora dopasuj długość taśmy.  
**EN:** Use the buckle to adjust the length of the tape.




- 10. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

## AD.2.

PL: STABILIZACJA ŚREDNIA

EN: MID STABILIZATION

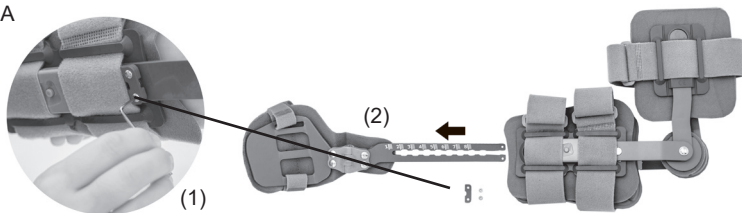


1. PL: Za pomocą kluczyka zdemontuj blokadę szyny (1) i wymontuj szynę (2) z wyrobu.

EN: Unscrew and Remove the splint with the Allen key.



2. PL: Załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby zegar szyny znajdował się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej.

EN: Place the orthosis on the upper limb but remember to place the drop-lock on the lateral epicondyle.

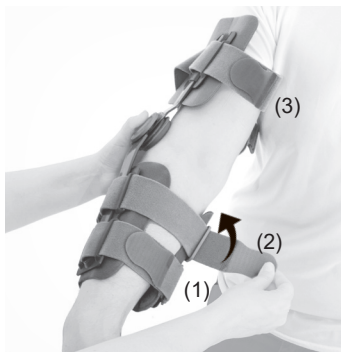

3. PL: Zapnij rzepy według podanej kolejności (1,2,3).  
EN: Fasten the Velcro closure according to the following steps (1,2,3).



4. PL: Przełóż pasek przez ramię.  
EN: Place the belt through the shoulder.



5. PL: Zapnij karabińczyk.  
EN: Fasten the clasp.



6. PL: Przyłóż rękę do temblaka i zapnij kłamrę  
EN: Place your wrist in a sling and fasten the buckle.






- 7. PL:** Za pomocą regulatora dopasuj długość taśmy.  
**EN:** Use the buckle to adjust the length of the tape.



- 8. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

### AD.3.

**PL:** STABILIZACJA SŁABA  
**EN:** LOW STABILIZATION

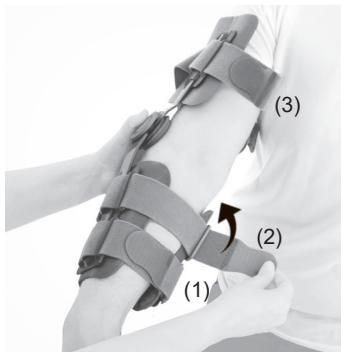

- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby zegar szyny znajdował się na nadkłykcium bocznym kości ramiennej.  
**EN:** Place the orthosis on the upper limb but remember to place the drop-lock on the lateral epicondyle.
- 2. PL:** Zapnij rzepy według podanej kolejności (1,2,3).  
**EN:** Fasten the Velcro closure according to the following steps (1,2,3).
- 3. PL:** Przelóż pasek przez ramię.  
**EN:** Place the belt through the shoulder.