


KOD KATALOGOWY	OKG-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-05
CODE	OKG-05
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-05




- 1. PL:** Załóż ortezę na zdrowy bark.
EN: Place sling on a healthy shoulder.



- 2. PL:** Przełóż ortezę na stronę chorej kończyny w taki sposób, aby rozeta krzyżowa (1) znalazła się na środku pleców, w równej odległości między łopatkami.
EN: Lay sling across back and place locking tab (1) on back, between scapulas.

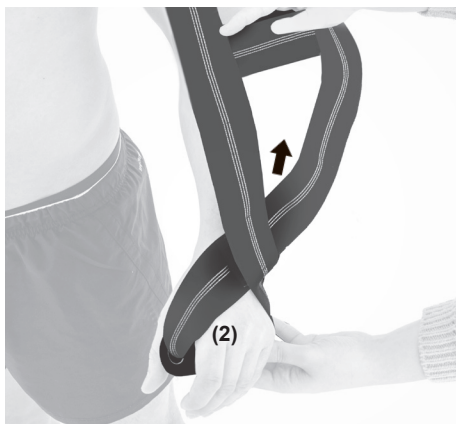

- 3. PL:** Ułóż rękę na specjalnym uchwycie dłoniowym (2).
EN: Place hand into special hand grip (2).

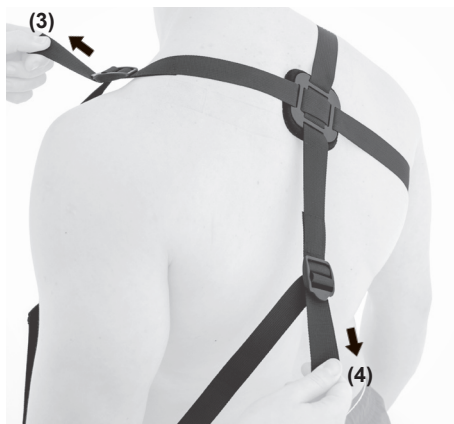


- 4. PL:** Ustaw odpowiednią długość pasków w przedniej i tylnej klamercie za pomocą regulatorów (3 i 4) tak, aby zredukować subluksację barku.
EN: Adjust the appropriate length of the straps on the front and rear buckles using the adjusters (3 and 4) to reduce shoulder subluxation.




5. PL: Ułóż taśmę przedramienia (5) poziomo poniżej łokcia.

EN: Place the forearm strap (5) horizontally below your elbow.

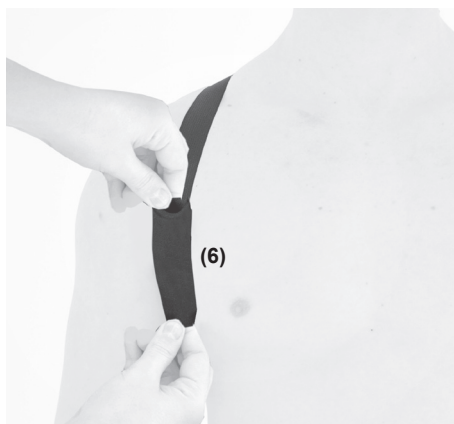


6. PL: Popraw ułożenie podpaszki (6) dla zapewnienia maksymalnego komfortu.

EN: Change position of armpit pads (6) for maximum comfort.

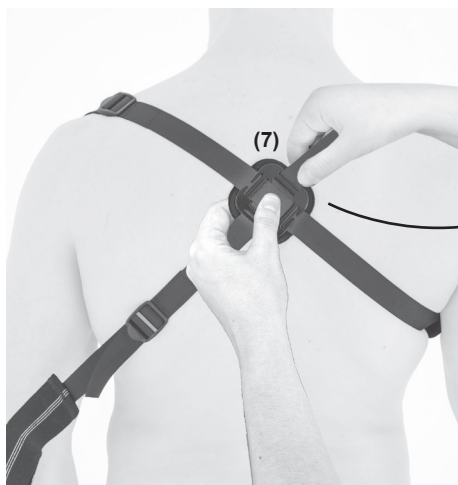


7. PL: Zablokuj pasy w rozecie krzyżowej (7), aby zapobiec jej przemieszczaniu.

EN: Lock straps in a locking tab (7) to prevent against changing position.

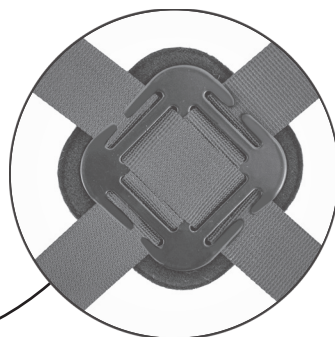


PL: Odblokowane

EN: Unlocked

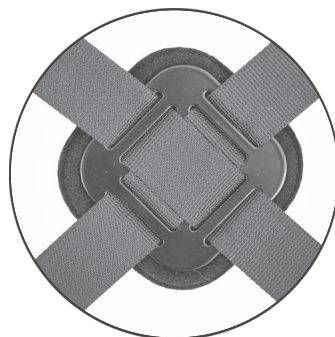

PL: Zablokowane

EN: Locked

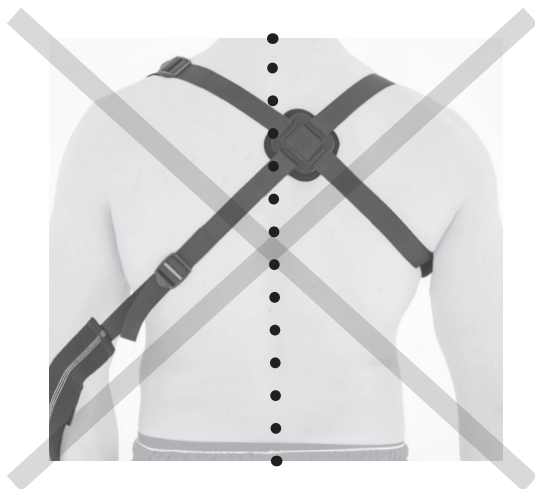

PL: Nieprawidłowe ułożenie ortezy.
EN: Incorrect position of the brace.



8. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.



PL: Prawidłowe ułożenie ortezy.
EN: Correct positioning of the brace.