

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать
онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3

medi Kniebandage

Назначение

Бандаж на коленный сустав medi Kniebandage может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

Показания

- Растяжение связок коленного сустава
- Отек и выпот в полости сустава
- Воспаление (при ревматизме, остеоартрите)

Противопоказания

Окклюзии артерий, флебиты, венозные язвы, состояние после тромбоза вен. При варикозной болезни и постоянном отеке нижней конечности следует одновременно с бандажом носить медицинский компрессионный чулок до колена (A-D).

Рекомендации по применению

Возьмите бандаж за верхний край и натяните его через стопу и голень до колена (рис. 1). Расположите центр бандажа над надколенником с целью улучшения фиксации (рис. 2). Для снятия изделия захватите нижний край бандажа и стяните его вниз (рис. 3).

Свойства

- Высокая эластичность изделия, вязка с учетом анатомических пропорций и способность растягиваться в двух направлениях обеспечивает оптимальное прилегание к телу.
 - Компрессионный эффект ускоряет рассасывание отека и внутрисуставного выпота, удаление продуктов обмена.
 - Бандаж быстро уменьшает воспаление и облегчает боли в пораженных областях.
-

Рекомендации по уходу

Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
 - Не отбеливать.
 - Сушите на воздухе.
 - Не гладьте.
 - Не подвергать химической чистке.
-



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!