

KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	AM-OSN-U-01
CODE	AM-OSN-U-01
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	AM-OSN-U-01




1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.




2. PL: Załóż ortezę na rękę.
Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

EN: Put the brace on your hand.
Attention! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

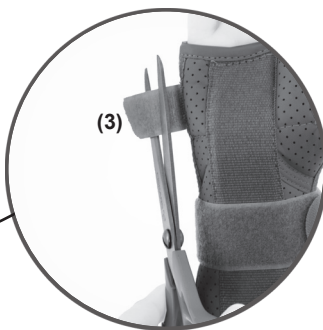

3. PL: Przepleć paski przez klamki i zapnij na rzepy według podanej kolejności (1,2,3).
 Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość rzepa (3).
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten with Velcro according to the following steps (1,2,3).
 If necessary, cut off any excess of the Velcro (3).

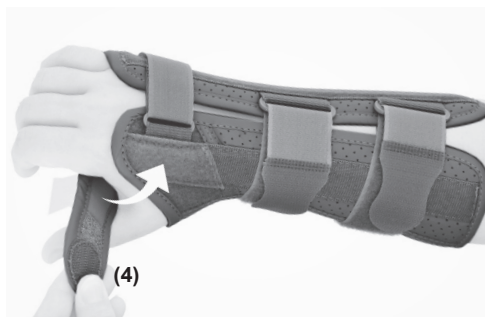

- 4. PL:** Zapnij rzep (4).
EN: Fasten with Velcro (4).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.