


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY I STAWU SKOKOWEGO
MODEL	AM-OSS-04
CODE	AM-OSS-04
TRADE NAME	FOOT AND ANKLE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSS-04



1. PL: Rozepnij ortezę i załóż na stopę.
EN: Unfasten the brace and put it on your foot.

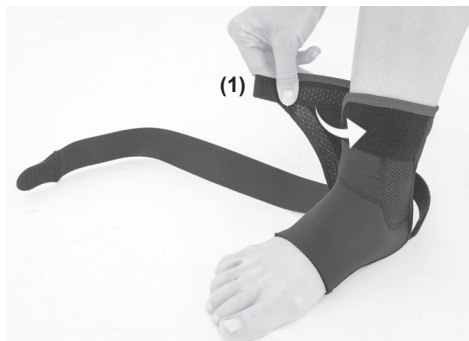

2. PL: Zapnij górny rzep (1).
EN: Fasten the upper Velcro (1).



3. PL: Zapnij pas ATFL (2) we wskazanym kierunku (3).
EN: Close the ATFL strap (2) according to the picture (3).





4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.