



KOD KATALOGOWY	AM-BX-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-BX-02
CODE	AM-BX-02
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-BX-02

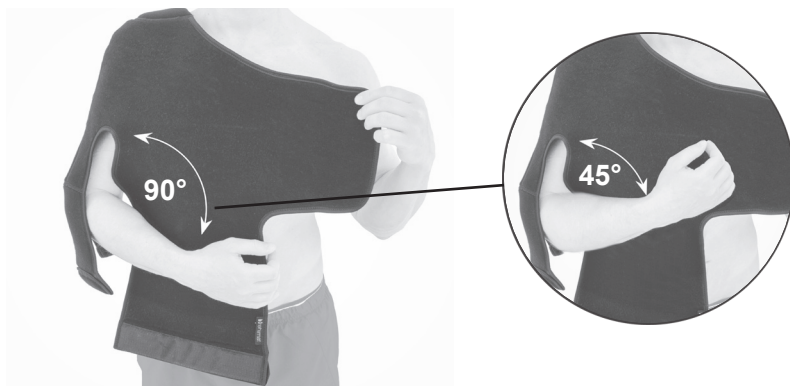

- 1. PL:** Załóż temblak w odpowiedniej pozycji terapeutycznej (90° lub 45°).
EN: Put the sling in the appropriate therapeutic position (90° or 45°).

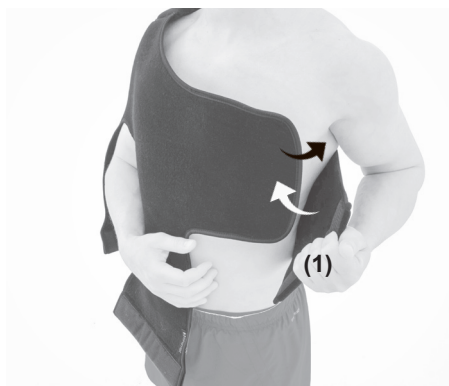

- 2. PL:** Zapnij ortezę na rzep (1).
EN: Fasten the Velcro closure (1)



- 3. PL:** Zapnij rzepowe zapięcie (2).
EN: Fasten the Velcro closure (2).



4. PL: Zapnij przednią część temblaka (3).
EN: Fasten the front Velcro closure (3).



5. PL: Zapnij zapięcie rzepowe na łokciu (4).
EN: Fasten the Velcro closure on the elbow (4).



6. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

