




KOD KATALOGOWY	AM-D-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-03
CODE	AM-D-03
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-03

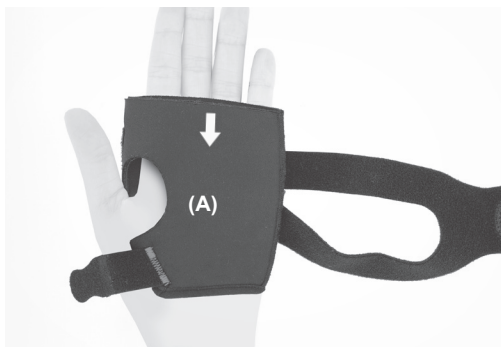



**1. PL:** Rozepnij ortezę (A) i załóż na rękę.  
**EN:** Unfasten the brace (A) and put it on your hand.

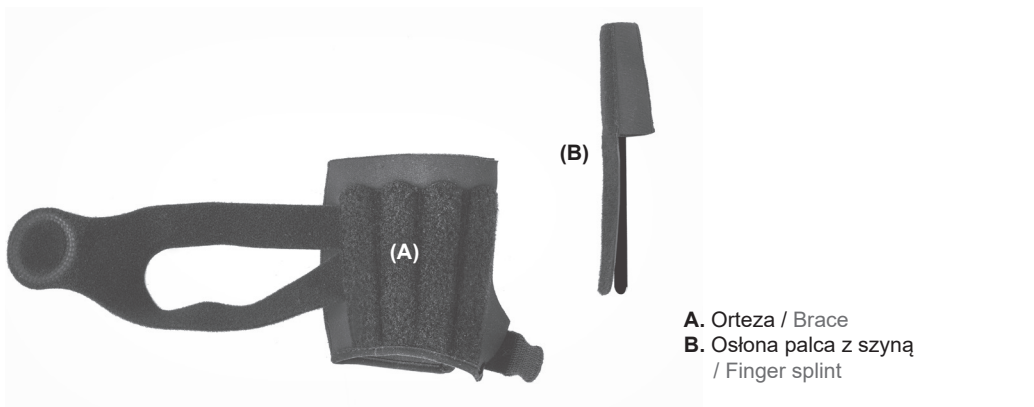

**2. PL:** Zapnij rzep (1) w nadgarstku.  
**EN:** Fasten the Velcro closure (1) on your wrist.

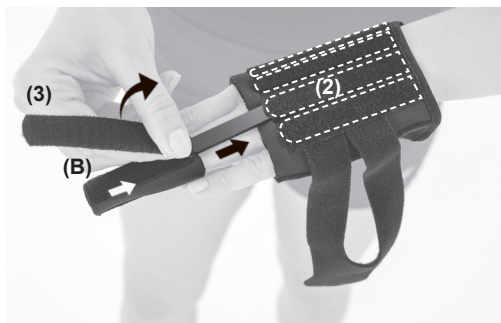

**3. PL:** Umieść osłonę palca (B) na odpowiednim palcu i wsuń szynę we właściwy tunel (2). Następnie zapnij rzep (3).  
**EN:** Place the finger splint (B) over the appropriate finger and slide the splint into the correct tunnel (2). Then fasten the Velcro (3).

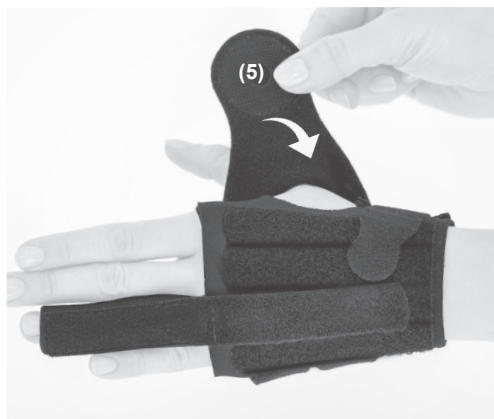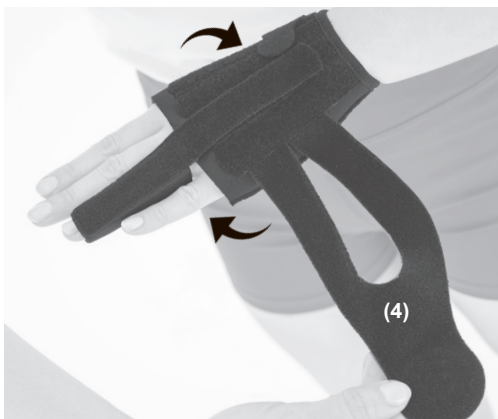

- 4. PL:** Opleć element (4) dookoła wewnętrznej strony śródreżca, przełóż przez kciuk i zapnij na rzep (5).  
**EN:** Wrap the element (4) around the inside of the metacarpus, put it through your thumb and fasten with Velcro (5).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.