


KOD KATALOGOWY	AM-D-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-04
CODE	AM-D-04
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-04



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



- 2. PL:** Umieść kciuk w ortezie.
EN: Put the thumb in a brace.

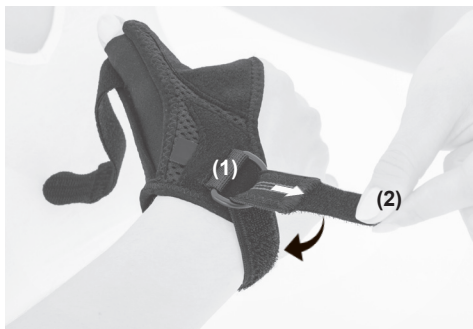

- 3. PL:** Przełóż pasek przez klamerkę (1) i zapnij rzep (2).
EN: Interlace the strap through the buckle (1) and close the Velcro fastener (2).



- 4. PL:** Zapnij pasek obwodowy kciuka (3).
EN: Fasten the circumferential strap of the thumb (3).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

