


KOD KATALOGOWY	AM-D-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-05
CODE	AM-D-05
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-05

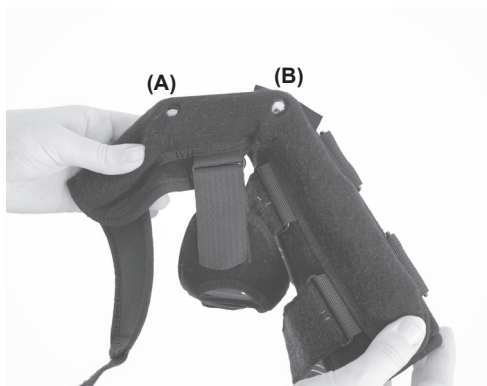


**1. PL:** Rozepnij ortezę i przy pomocy kluczyka imbusowego poluzuj zawiasy (A,B) służące do regulacji usztywnienia dłoni.

**EN:** Unfasten the orthosis and, using the Allen key, loosen the hinges (A, B) used to adjust the stiffening of the hand

**PL: UWAGA! PRZED ZAŁOŻENIEM ORTEZY NA RĘKĘ UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZAWIASY (A,B) MOŻNA SWOBODNIE REGULOWAĆ. NIEDOZWOLONE JEST MODELOWANIE PRODUKTU JEŚLI REGULACJA NIE JEST PŁYNNĄ. GROZI TO USZKODZENIEM LUB ZŁAMANIEM USZTYWNIENIA.**

**EN: ATTENTION! BEFORE PUTTING THE BRACE ON, MAKE SURE THAT THE HINGES (A, B) CAN BE ADJUSTED FREELY. MODELLING THE PRODUCT IS NOT ALLOWED IF THE REGULATION IS NOT SMOOTH. THIS MAY DAMAGE OR BREAK THE BRACE.**

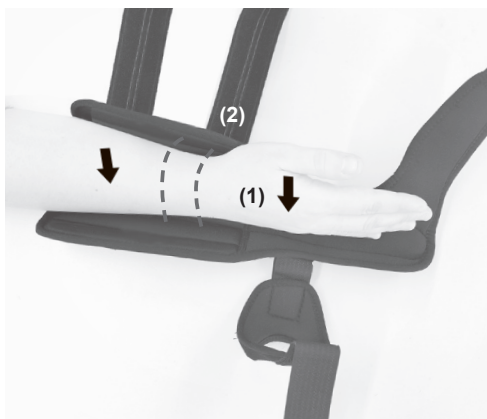


**2. PL:** Połóż rękę na ortezie (1) w taki sposób, aby pasek (2) przebiegał przez nadgarstek.

**EN:** Put your hand on the brace (1), so that the strap (2) runs over the wrist.



**3. PL:** Przepleć taśmy obwodowe (2,3) przez klamry i zapnij je na rzepy.

**EN:** Interlace the circumferential straps (2,3) through the buckles and close them with Velcros.

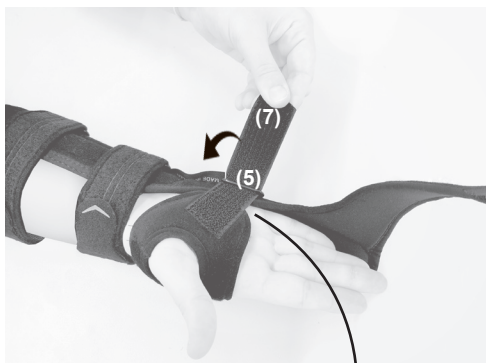


**4. PL:** Załóż element stabilizujący (4) na kciuk, przepleć taśmę przez klamerkę (5). Podciągnij rzepy (6,7) i zapnij je.

**EN:** Put the stabilizer (4) on your thumb, interlace the strap through the buckle (5). Pull up the Velcro straps (6,7) and close them.



**5. PL:** Opleć pas stabilizujący (7) wokół palców i zapnij na rzep.

**EN:** Wrap the stabilizing strap (7) around your fingers and fasten with Velcro.

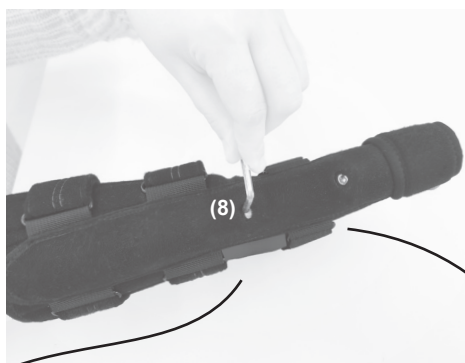

- 6. PL:** Ustaw odpowiednią pozycję ręki, i za pomocą kluczyka imbusowego zablokuj zawiasy (A,B).  
**EN:** Set the correct hand position and use the Allen key to lock the hinges (A, B).



- 7. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.