



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-L-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-L-06
CODE	AM-OSN-L-06
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-L-06

**PL: CZĘŚCI SKŁADOWE ORTEZY:**


- (A) Plastikowa podstawa ortezy
- (B,C,D,E) Taśmy obwodowe

**EN: COMPONENTS OF THE BRACE :**

- (A) Flexible basis
- (B,C,D,E) Circumferential straps

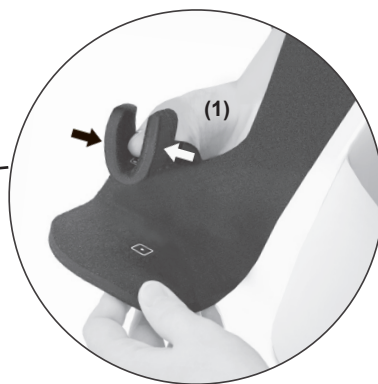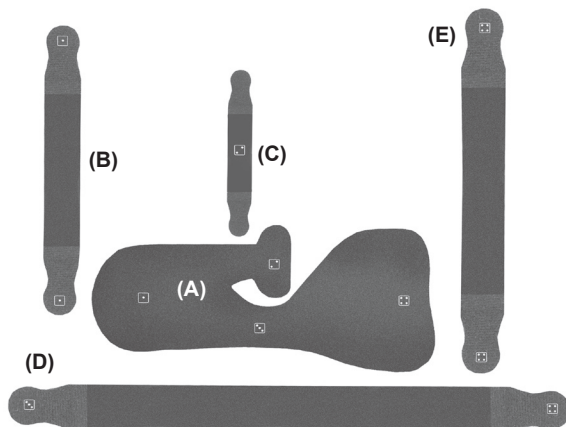

1. **PL:** Dopasuj ortezę (A) do ręki (1).
- EN:** Adjust the brace (A) to the hand (1).

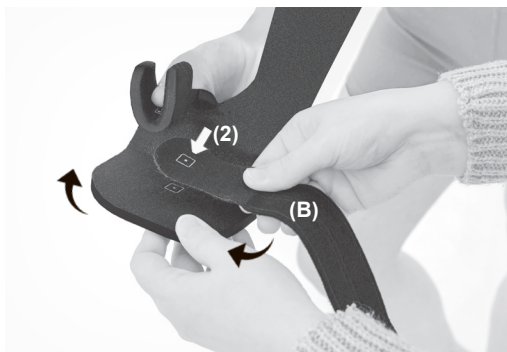


- 2. PL:** Przytnij taśmę dłoniową (B) na rzep w oznaczonym miejscu (2). Opleć wokół dłoni i zapnij na rzep (3).  
**EN:** Fasten the palm strap (B) with the Velcro, wrap it around your hand and fasten with the Velcro.





- 3. PL:** Przytnij taśmę kciuka (C) w oznaczonym miejscu (4). Opleć wokół kciuka i zapnij na rzep (5).  
**EN:** Attach the thumb strap (C) to the marked area (4). Wrap around the thumb and fasten with Velcro (5).




- 4. PL:** Przytnij taśmę (D) na rzep (6) do ortozy w oznaczonym miejscu.  
**EN:** Attach the Velcro strap (D) (6) to the brace at the marked point.

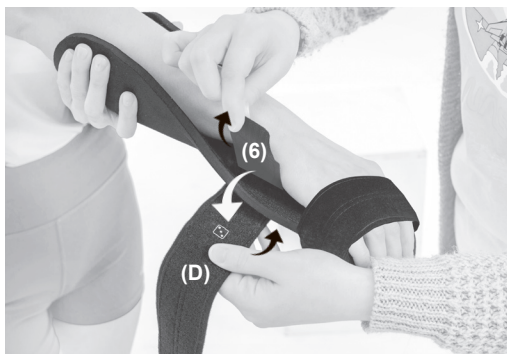

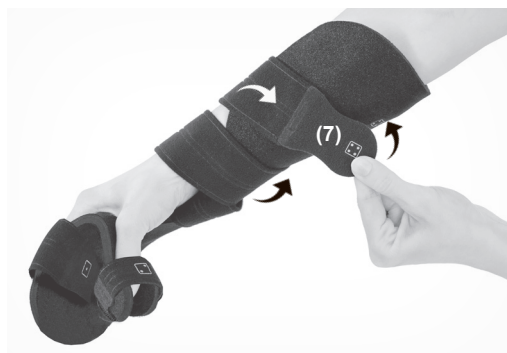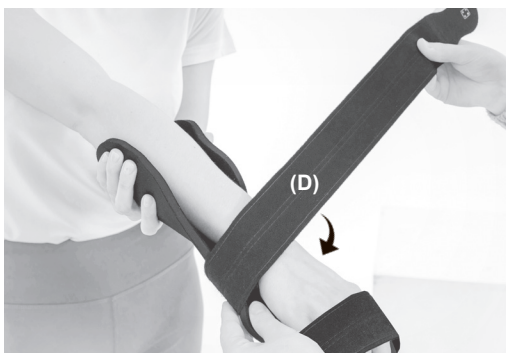

**5. PL:** Opleć taśmę (D) wokół nadgarstka i przedramienia i zapnij na rzep (7) w oznaczonym miejscu.

**EN:** Place the tape (D) around the wrist and forearm and fasten with the Velcro fastener (7) at the marked point..

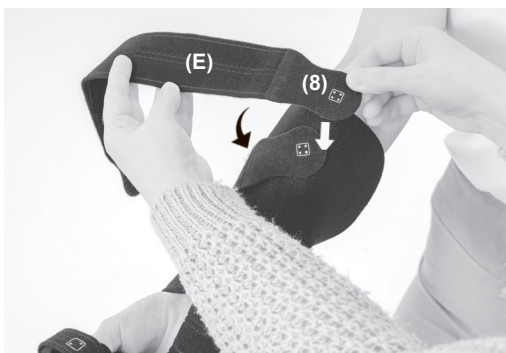

**6. PL:** Przypnij taśmę (E) w oznaczonym miejscu (8). Opleć wokół przedramienia i zapnij na rzep (9).

**EN:** Place the tape (E) at the marked point (8). Wrap around your forearm and fasten with Velcro (9).



**7. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.