



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	AM-OSN-U-02
CODE	AM-OSN-U-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	AM-OSN-U-02




- 1. PL:** Rozepnij ortezę i wyjmij usztywnienie kciuka (1).  
**EN:** Unfasten the brace and remove thumb stiffening (1).

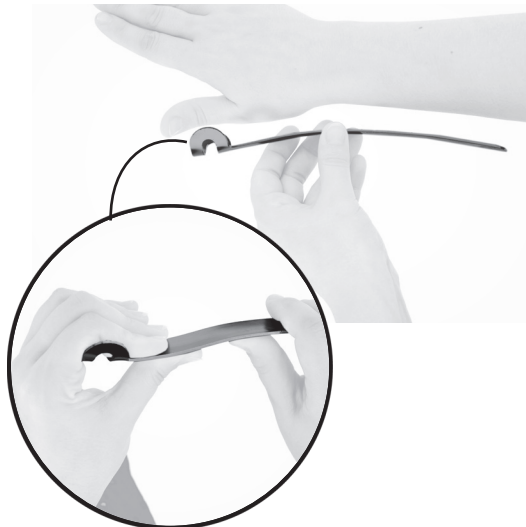

- 2. PL:** Uformuj usztywnienie kciuka według wskazań terapeutycznych i umieść w ortezie.  
**EN:** Shape the thumb stiffening according to the therapeutic indications and place it in the orthosis.

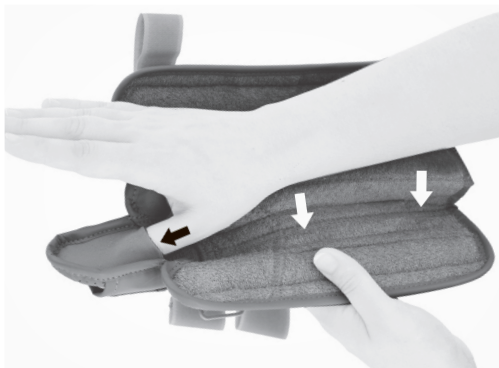


- 3. PL:** Załóż ortezę na rękę i umieść kciuk w osłonie.  
**Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.**  
**EN:** Put the brace on your hand and place your thumb in the cap.  
**Attention! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.**

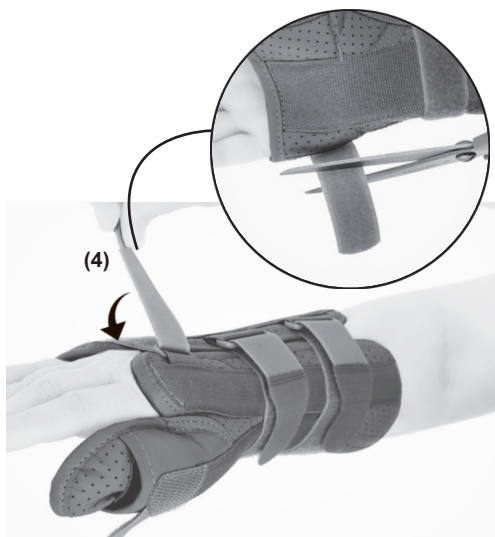

**4. PL:** Przepleć paski przez klamki i zapnij na rzepy według podanej kolejności (2,3).  
Zapnij rzep (4). Jeśli jest taka potrzeba odetnij nadmiar rzepa.

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten with Velcro according to the following steps (2,3).  
Fasten with Velcro (4). If necessary, cut off any excess part.

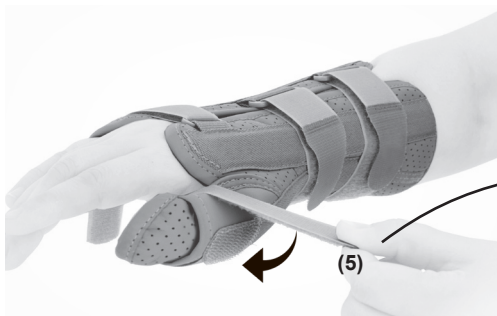

**5. PL:** Zapnij rzep obwodowy kciuka (5). Jeśli jest taka potrzeba odetnij nadmiar rzepa.

**EN:** Fasten the thumb with wrap-around strap (5). If necessary, cut off any excess part.



**6. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.