


KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-04
CODE	AM-OSN-U-04
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-04





1. **PL:** Rozepnij ortezę i wyjmij usztywnienie kciuka (1).  
**EN:** Unfasten the brace and remove the thumb splint (1).


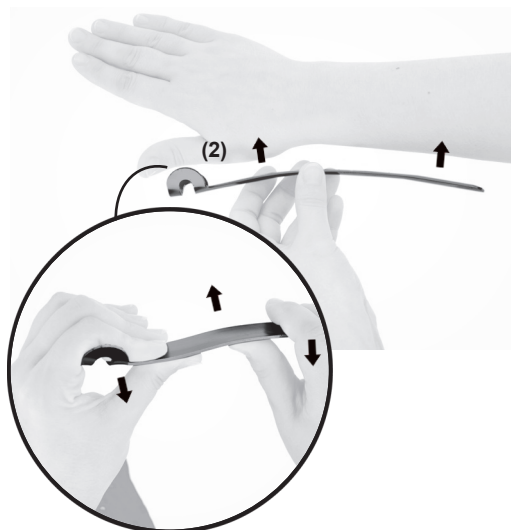


2. **PL:** Uformuj usztywnienie kciuka (2) według wskazań terapeutycznych i umieść je w ortezie.  
**EN:** Form the thumb splint (2) according to your therapeutic needs and place it inside the brace.


3. **PL:** Załóż ortezę na rękę i umieść kciuk w osłonie (3).  
**Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu.**  
**EN:** Put the brace on your hand keeping the thumb in the special part (3).  
**Attention! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint.**

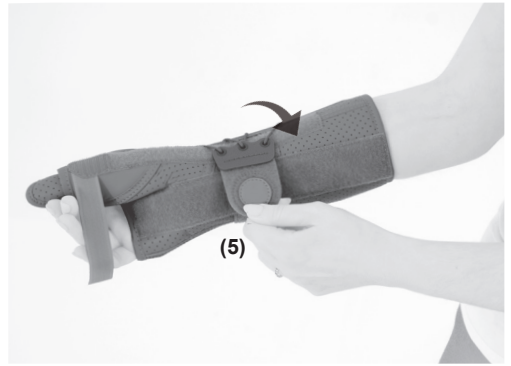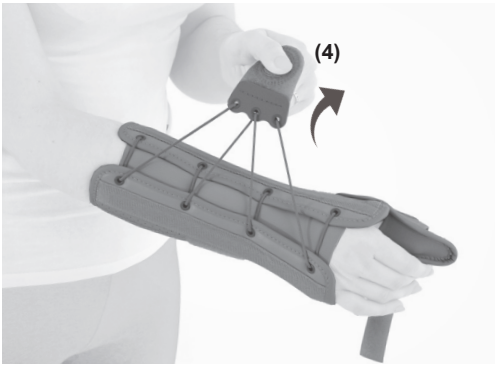

- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję poprzez naprężenie linek (4) i zapnij na rzep (5).  
**EN:** Set the correct compression by tightening the lines (4) and fasten with Velcro (5).

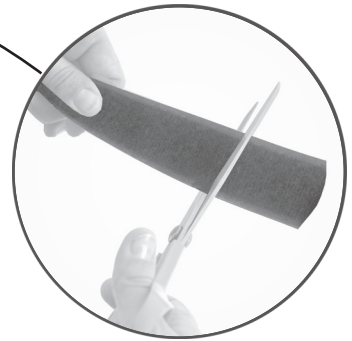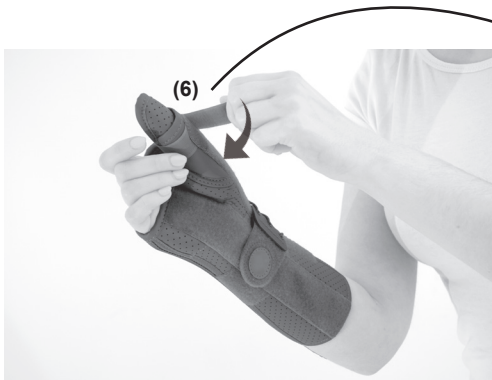

- 5. PL:** Zapnij rzep obwodowy kciuka (6). Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość rzepa.  
**EN:** Fasten the thumb wrap-around strap (6). If necessary, cut off any unnecessary length of the Velcro.

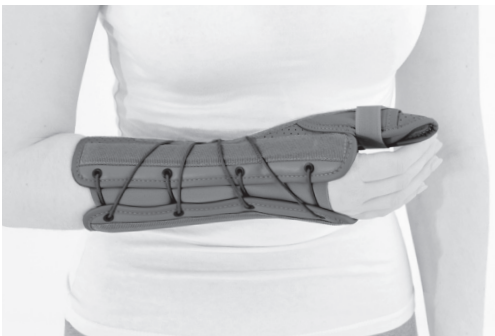

- 6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.