



KOD KATALOGOWY	OKG-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-04
CODE	OKG-04
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-04

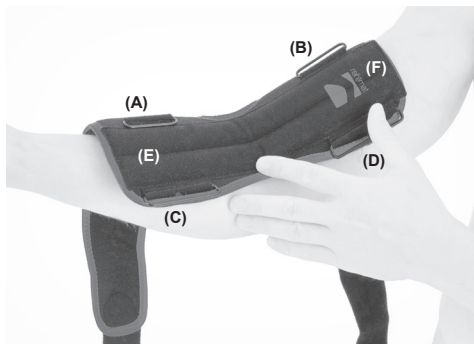

PL: A,B,C,D - klamerki, E - stalki, F - logo
EN: A,B,C,D - buckles, E - splints, F - logo

- PL:** Stalki ortozy należy ustawić w pożądanym kącie zgięcia
EN: Splints should be adjusted in the required angle of flexion.

- PL:** Przyłóż ortezę do kończyny w taki sposób, aby logo znajdowało się na kości ramiennej.
EN: The brace should be applied on the arm with the logo on the upper arm.

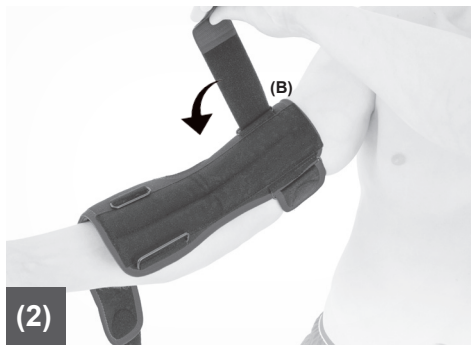

- PL:** Przepleć pasek przez górne klamry D(1) i B(2). Owiń wokół ramienia i zapnij rzep (3) w podanej kolejności.
EN: Interlace the strap through the upper buckles D(1) i B(2). Wrap around the shoulder and fasten the Velcro (3) in the specific way.



4. **PL:** Powtórz czynność jeszcze raz jak w przypadku zapięcia górnego.
EN: Repeat this procedure again as for the top fastener.



5. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.