



KOD KATALOGOWY	OKG-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-01
CODE	OKG-01
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-01

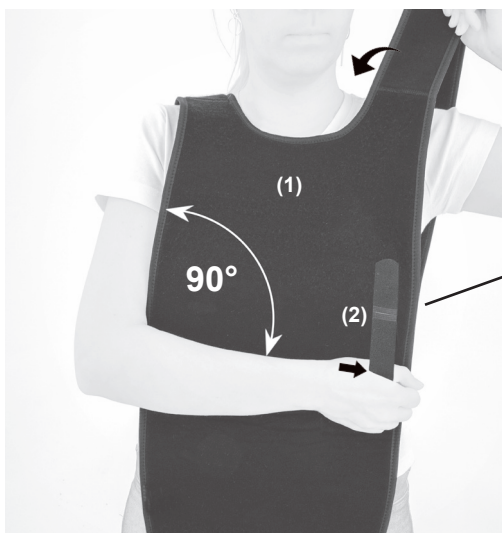

**1. PL:** Załóż temblak (1) w odpowiedniej pozycji terapeutycznej (90° lub 45°). Przypnij na rzep pętłkę kciuka (2) w odpowiednim miejscu i włóż kciuk w pętłkę.

**EN:** Put the sling (1) on the correct therapeutic (90° lub 45°) position. Fasten the thumb loop (2) in the right place and insert the thumb into loop.

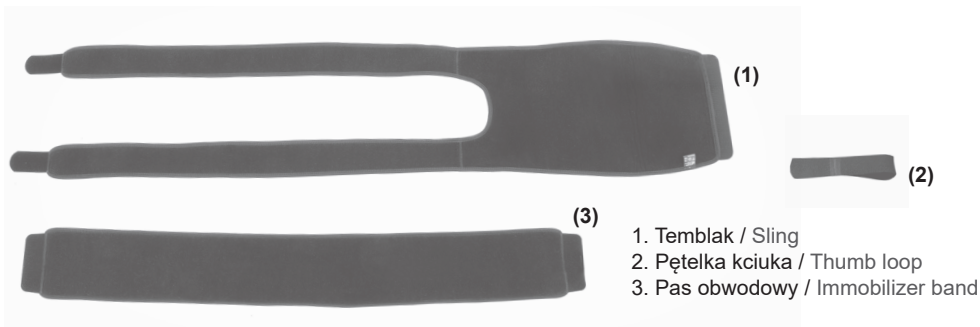

**2. PL:** Zapnij przednią część tembla. **EN:** Fasten the Velcro closure.



**3. PL:** Skrzyżuj tylne pasy naramienne.  
**EN:** Cross the shoulder straps.



**4. PL:** Zapnij rzepowe zapięcia z przodu temblaka.  
**EN:** Fasten the Velcro closures on the sling.



**5. PL:** Przypomnij pas obwodowy (3), owiń go wokół tułowia i zapnij z przodu.  
**EN:** Attach the immobilizer band (3), wrap around the trunk and fasten the Velcro closure.



**6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.