


KOD KATALOGOWY	T-RANGE
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	AM-KG-AM/1R
CODE	T-RANGE
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	AM-KG-AM/1R


1. PL: Obejmij ręką uchwyt dłoniowy (1) i załóż ortezę na całą kończynę.

EN: Grip the gripper (1) and place the brace on the upper limb.

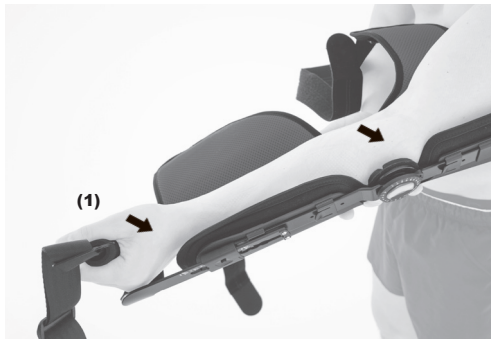


2. PL: Ustaw odpowiednią długość szyny przedramienia (2).

EN: Set the correct length of the forearm splint (2).

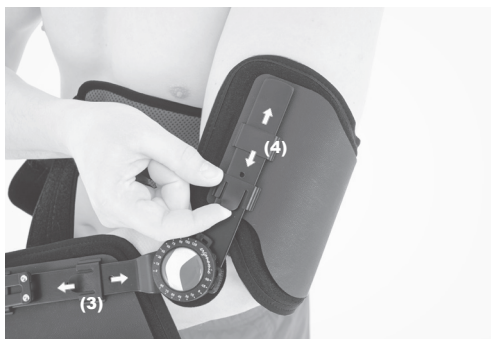

3. PL: Ustaw odpowiednią wysokość pelot ramienia i przedramienia (3 i 4).

EN: Adjust the arm and forearm supports to the correct height (3 and 4).


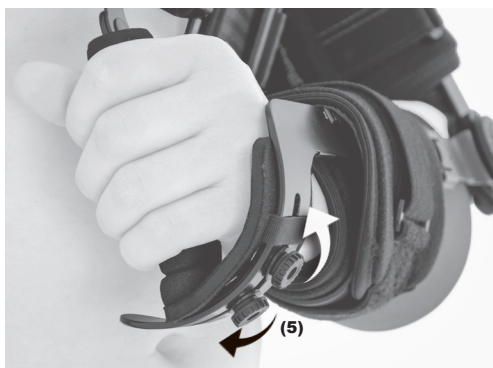


4. PL: Poluzuj nakrętki uchwytu dłoniowego (5), ustaw przedramię w pożądanej pozycji i ustabilizuj uchwyt dokręcając nakrętki.

EN: Loosen the nuts of the palm grip (5) and set the forearm to the desired position, stabilize the grip by tightening the nuts.



5. PL: Zapnij opaskę ramienia i przedramienia (6 i 7).

EN: Fasten the arm and forearm bands (6 and 7).

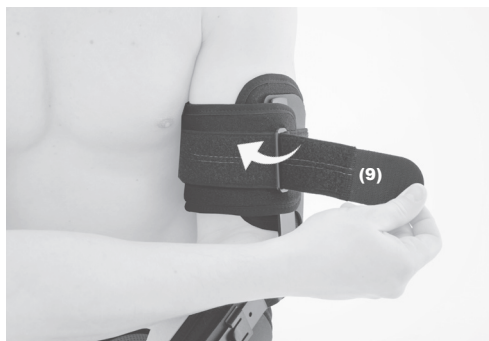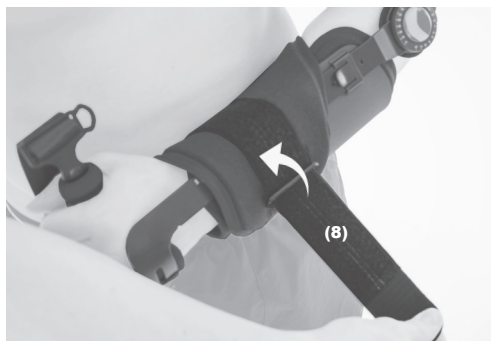

6. PL: Zapnij paski obwodowe ortezy (8 i 9).

EN: Fasten the circumferential straps of the brace (8 and 9).

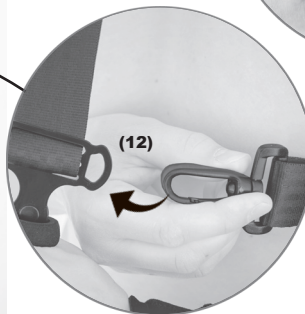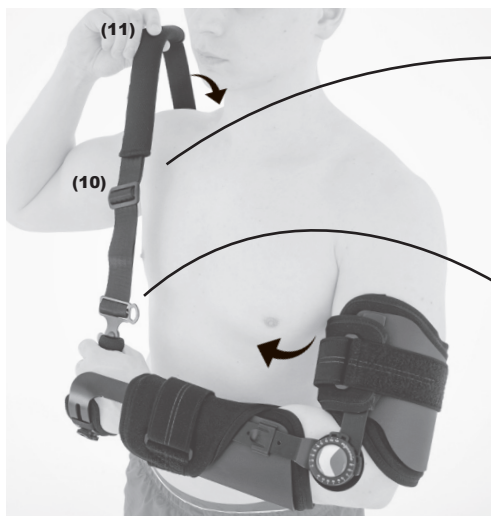

7. PL: Przelóż temblak przez bark i plecy (10) umieszczając osłonę szyi (11) w odpowiednim miejscu.

Przypnij koniec temblaka do klamki przy uchwycie dłoni (12) i za pomocą regulatora (13) dopasuj długość taśmy.

EN: Pass the sling (10) over the shoulder (10) placing the neck protector (11) in the appropriate place.

Attach the end of the sling to the clip at the hand grip (12) and adjust the length of the strap with the adjuster (13).



8. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.