




KOD KATALOGOWY	AM-SL-01/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	AM-SL-01/CCA
CODE	AM-SL-01/CCA
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	AM-SL-01/CCA




- 1. PL:** Przed założeniem rozepnij ortezę, podciągnij tarczę zegara (1) do góry i poluzuj system BOA®.
EN: Unfasten the brace before putting it on, pull the dial (1) up and loosen the BOA® Fit System.

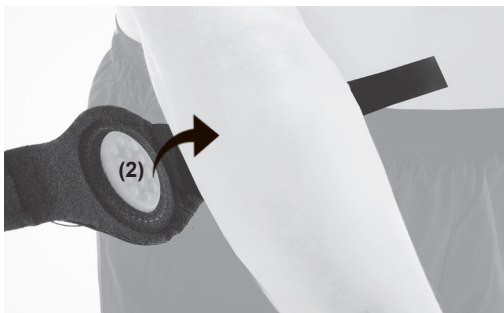

- 2. PL:** Umieść ortezę na kończynie, tak aby element silikonowy (2) w odpowiedni sposób odciążał przyczep prostowników.
EN: Place the brace on the limb, so that the silicone element (2) properly relieves the extensor extensor muscle.

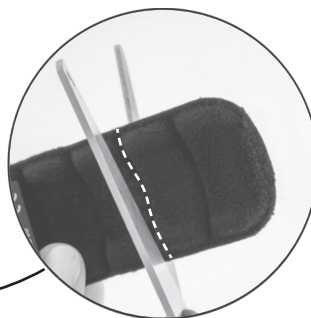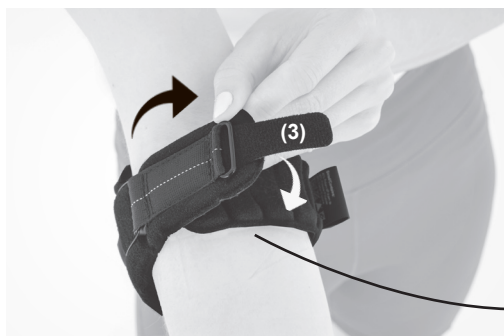

- 3. PL:** Opleć ortezę wokół przedramienia i zapnij na rzep (3). Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość ortozy w wyznaczonym miejscu.
EN: Wrap the brace around your forearm and fasten with the Velcro (3). If necessary, cut off the unnecessary length of the brace in the appropriate place.

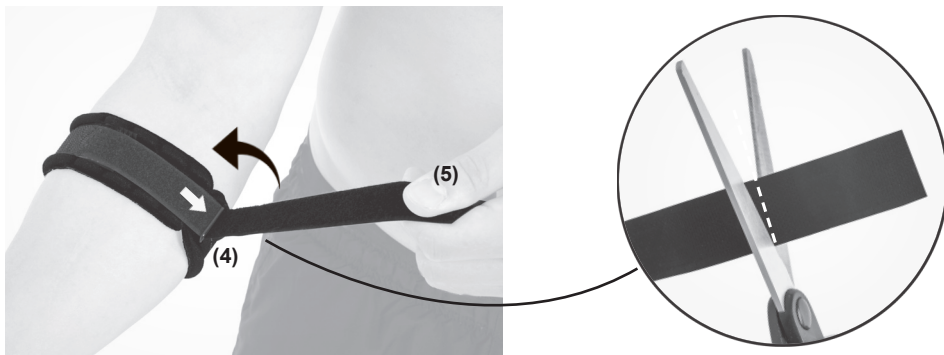

4. PL: Przepleć pasek przez klamrę (4), ustaw odpowiednie napięcie i zapnij na rzep (5).
Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość paska.

EN: Interlace the strap through the buckle (4), adjust the tension and fasten with the Velcro (5).
If necessary, cut off the unnecessary length of the belt.



5. PL: Wciśnij tarczę zegara (6) i za pomocą systemu BOA® ustaw odpowiednią kompresję (7)

EN: Press the dial (6) and use the BOA® Fit System to set the appropriate level of compression (7).



6. PL: Gotowy produkt.

EN: Product is ready to use.