


KOD KATALOGOWY	AS-L-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	ORTEZA ŁOKCIA AS-L-01
CODE	AS-L-01
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	ELBOW ORTHOSIS AS-L-01

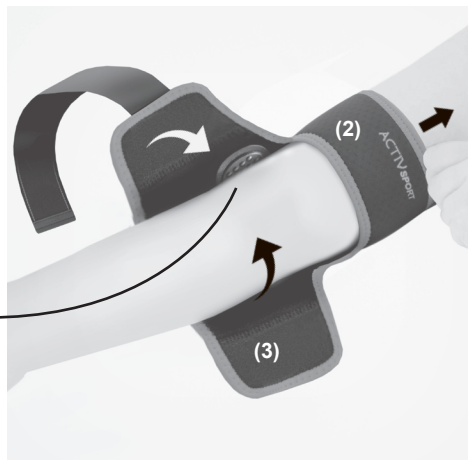

**1. PL:** W zależności od schorzenia, umieść pelotę (1) po stronie bocznej stawu (łokieć tenisisty) bądź przyśrodkowej (łokieć golfisty).

**EN:** Depending on your condition, place the silicone pad (1) on the lateral side of the joint (tennis elbow) or on the medial side (golfer's elbow).

**2. PL:** Załóż ortezę na rękę (2) i zapnij rzep (3).

**EN:** Put the brace on your arm (2) and fasten the Velcro (3).



**3. PL:** Przepleć pasek (4) przez klamrę i zapnij na rzep.

**EN:** Interlace the straps (4) through the buckles and fasten the Velcro.

**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.