

KOD KATALOGOWY	AM-WSP-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AM-WSP-02
CODE	AM-WSP-02
TRADE NAME	SPINAL ORTHOSIS
MODEL	AM-WSP-02




A. Orteza / Brace

B. Pelota brzuszna / Abdominal pad

1. PL: Rozepnij ortezę (A), połuzuj zapięcia (1,2) i załóż ortezę na ramiona.

EN: Unfasten the brace (A), loosen fasteners (1,2) and put it on your shoulders.

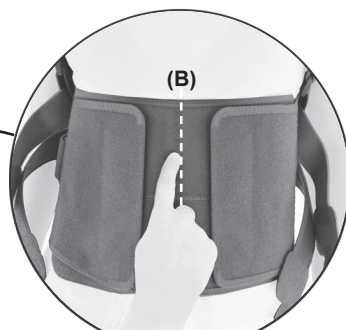





2. PL: Przypnij przednią część ortozy na rzepy (3,4) do peloty brzusznej (B). Zwróć uwagę na to, aby orteza była zapięta symetrycznie.

EN: Attach the front part of the Velcro fastener (3,4) to the abdominal pad (B). Make sure that the brace is buckled symmetrically.



3. PL: Zapnij dolne pasy dociągowe na rzep (5,6). Jeśli istnieje potrzeba odepnij rzep (7), odetnij zbędną długość pasa (8), i ponownie przypnij rzep (7). Następnie zapnij pasy dociągowe.

EN: Fasten the lower tension belts (5,6). If necessary, unfasten the Velcro (7), cut off the excess length of the belt (8), and fasten the Velcro again (7). Then fasten the tension belts.

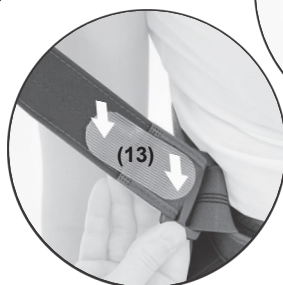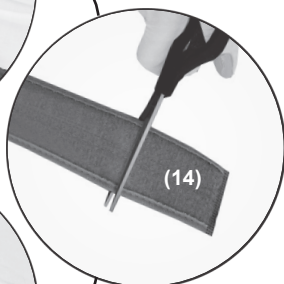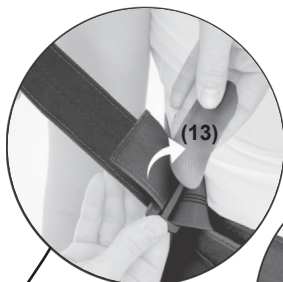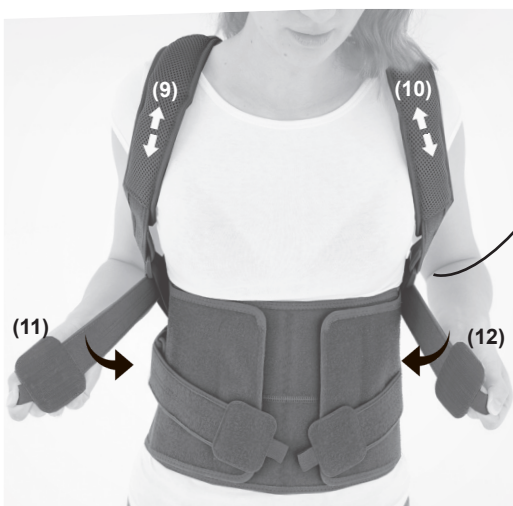

4. PL: Ustaw osłony szelek (9,10) w odpowiednim miejscu. Zapnij górne pasy dociągowe na rzepy (11,12). Jeśli istnieje potrzeba odepnij rzep (13), odetnij zbędną długość pasa (14), i ponownie przypnij rzep (13). Następnie zapnij pasy dociągowe.

EN: Put the harness covers (9,10) in the right place. Fasten the upper tension belts with Velcro (11,12). If necessary, unfasten the Velcro (13), cut off the excess length of the belt (14), and fasten the Velcro (13) again. Then fasten the tension belts.



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.