



KOD KATALOGOWY	AM-WSP-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AM-WSP-06
CODE	AM-WSP-06
TRADE NAME	SPINAL ORTHOSIS
MODEL	AM-WSP-06



- 1. PL:** Załóż ortezę na ramiona i dopasuj odpowiednią wysokość stelaża (1).
EN: Put the brace on your shoulders and set the appropriate height of the frame (1).

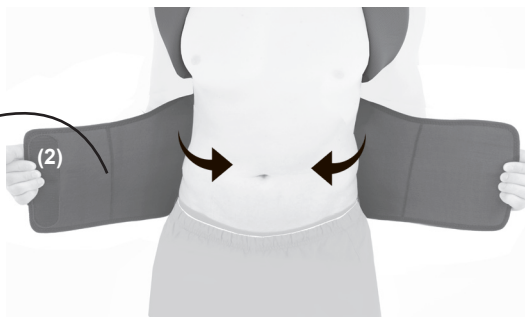

- 2. PL:** Zapnij przednią część ortozy na rzep (2).
EN: Fasten on velcro the front part of the brace (2).

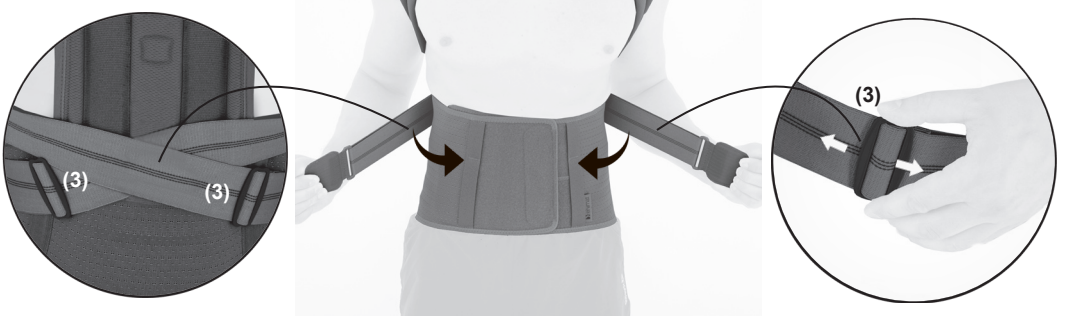

- 3. PL:** Ustaw odpowiednią długość szelek przy pomocy regulatorów (3) i zapnij je.
EN: Adjust the harness to the desired length using the adjusters (3) and fasten them.

PL: **UWAGA!** Ortezy można używać w formie samej sznurówki (LSO), jako niski poziom stabilizacji.

EN: **WARNING!** The brace can be used as a laces (LSO) as a light stabilization level.

WYSOKI POZIOM STABILIZACJI TLSO / HIGH TLSO STABILIZATION



NISKI POZIOM STABILIZACJI LSO / LOW LSO STABILIZATION



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.