



KOD KATALOGOWY	EB-LK-01/TLSO
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA EB-LK-01/TLSO
CODE	EB-LK-01/TLSO
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT EB-LK-01/TLSO

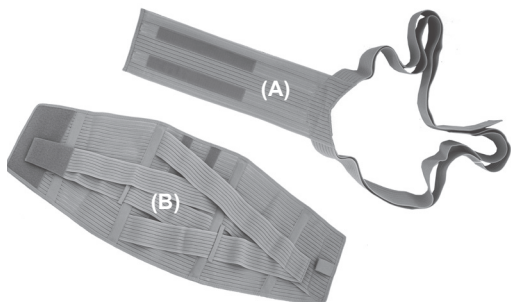

PL: (A) PROSTOTRZYMACZ
 EN: (A) POSTURE FRAME
 PL: (B) PAS ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
 EN: (B) LUMBO-SACRAL BELT

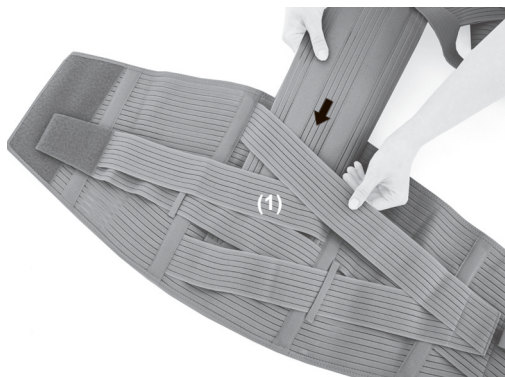

1. PL: Przytnij prostotrzymacz do pasa (1).
 EN: Fasten the posture frame to the belt (1).



2. PL: Załóż ortezę na ramiona (2) i dopasuj odpowiednią wysokość stelaża (3)
 EN: Put the brace on your shoulders (2) and adjust the required height of the posture frame (3).



3. PL: Zapnij przednią część ortozy na rzep (4).
 EN: Fasten the Velcro on the front part of the brace (4).



4. PL: Zapnij pasy dociągowe (5).
 EN: Fasten the tension belts (5).



5. PL: Skrzyżuj szelki na plecach (6) i zapnij z przodu na rzep (7).

EN: Cross the shoulder straps on the back (6) and fasten them at the front (7).

PL: UWAGA! Ortezę można używać w formie samej sznurówki (LSO) jako niski poziom stabilizacji.

EN: WARNING! The brace can be used without the posture frame (LSO) as a light stabilization level.

NISKI POZIOM STABILIZACJI LSO / LOW LSO STABILIZATION



WYSOKI POZIOM STABILIZACJI TLSO / HIGH TLSO STABILIZATION



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.