




KOD KATALOGOWY	AM-D-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-02
CODE	AM-D-02
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-02

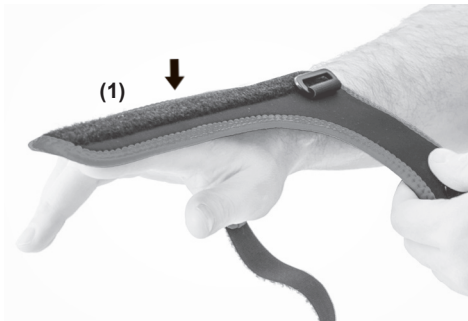

1. **PL:** Załóż ortezę na rękę (1) i opleć pasek wokół nadgarstka (2).
EN: Place the brace on your hand (1) and wrap the strap around your wrist (2).



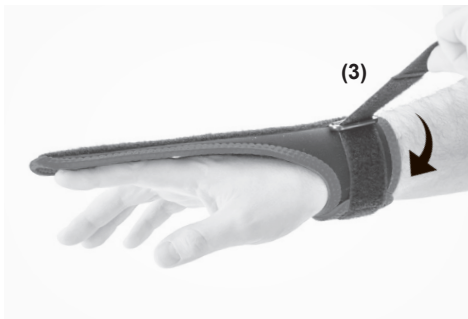


2. **PL:** Przepleć taśmę przez klamerkę i zapnij na rzep (3).
EN: Interlace the strap (3) through the buckle and fasten with Velcro (3).

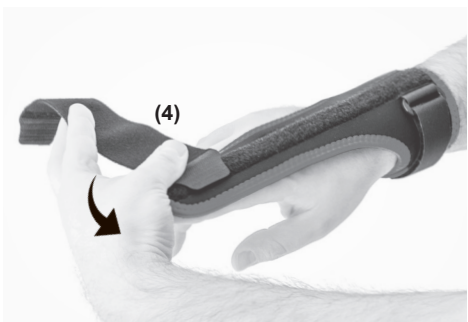

4. **PL:** Przypnij taśmę (4) do ortozy, opleć palec we wskazanym kierunku i zapnij rzep (5).
EN: Attach the strap (4) to the brace, wrap the finger in the indicated direction and fasten the Velcro (5).

5. **PL:** Przypnij taśmę (6) w okolicy śródręcza.
EN: Attach the strap (6) in the metacarpal area.

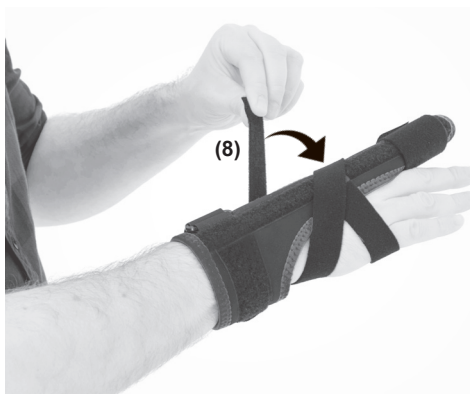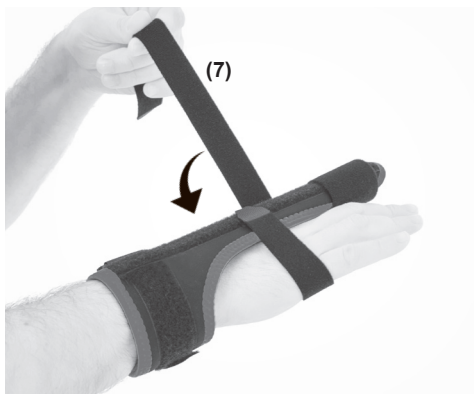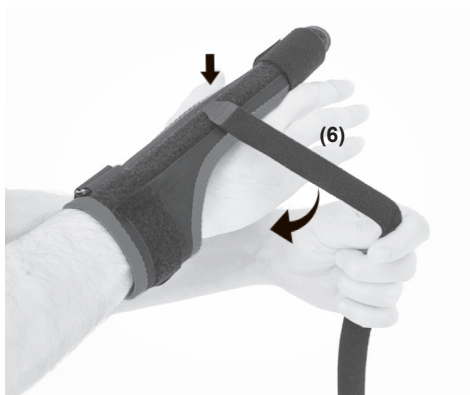

6. **PL:** Owiń taśmę wokół śródręcza (7) i zapnij rzep (8).
EN: Wrap the strap around the metacarpus (7) and close the Velcro (8).



7. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

PL: UWAGA! W sposób opisany powyżej można usztywnić palce II-V.
EN: WARNING! You can use the brace in this way to stiffen fingers II-V.