

KOD KATALOGOWY	AR-SO-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	AR-SO-01
CODE	AR-SO-01
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	AR-SO-01



(A) Orteza / Brace

(B) Pasy dociągowe / Tension belts



**1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj pasy dociągowe (B).

**EN:** Unfasten the brace and loosen the tension belts (B).

**2. PL:** Przyłóż ortezę (A) w okolice lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa i zapnij na rzep (1).

**EN:** Place the brace (A) on your lower back and fasten the Velcro closure (1).



**3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy dociągowe (B) na rzepy.

**EN:** Set the proper compression and fasten the tension belts (B) with Velcro.



**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.