



KOD KATALOGOWY	AS-LK-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	AS-LK-02
CODE	AS-LK-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	AS-LK-02

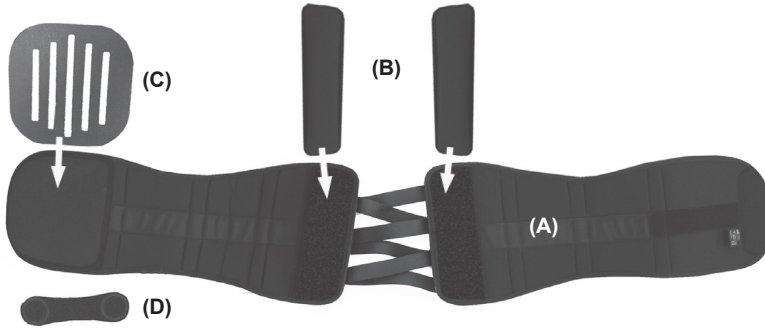


- PL:** (A) Orteza lędźwiowo-krzyżowa
 (B) Dwie peloty lędźwiowe
 (C) Pelota brzuszna
 (D) Rzep zabezpieczający
- EN:** (A) Back brace
 (B) Lumbar pads
 (C) Abdominal pad
 (D) Velcro fastening





- 1. PL:** Rozepnij ortezę (A).
EN: Unfasten the brace (A).

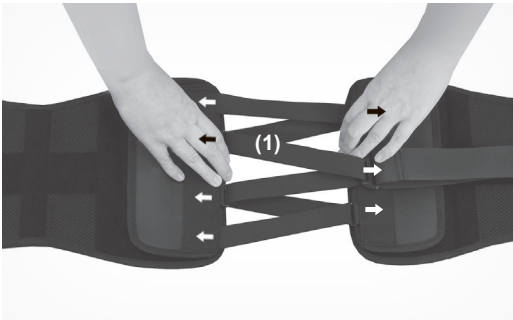


- 2. PL:** Poluzuj system kompresyjny TLS (1) w taki sposób, aby element napinający (2) znajdował się w odpowiednim miejscu.
EN: Loosen the TLS compression system (1), so that the tensioner (2) is in the appropriate place.

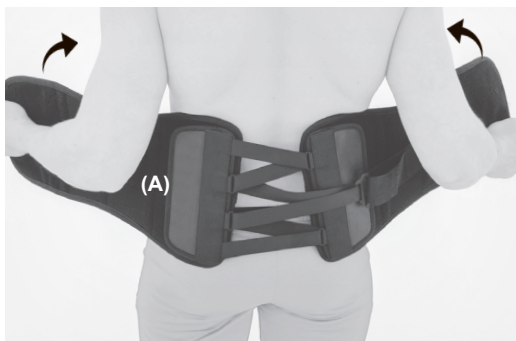

- 3. PL:** Przyłóż ortezę (A) do odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa i zapnij z przodu na rzep (3).
EN: Place the brace (A) on the lumbosacral spine and fasten it with Velcro at the front (3).

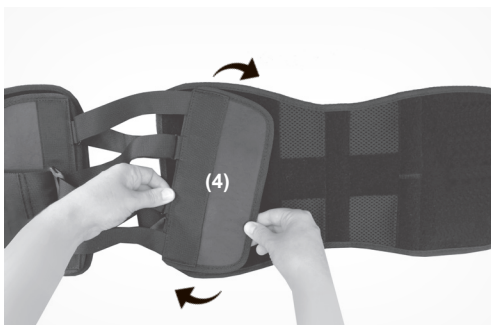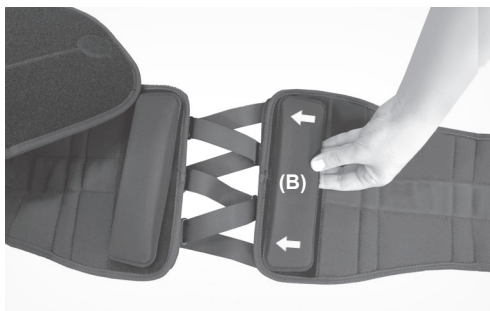


- PL: UWAGA!** Istnieje możliwość regulacji miejsca przypięcia pelot lędźwiowych (B) oraz systemu TLS (4).
EN: ATTENTION! It is possible to adjust the place of attaching the lumbar pads (B) and the TLS system (4).

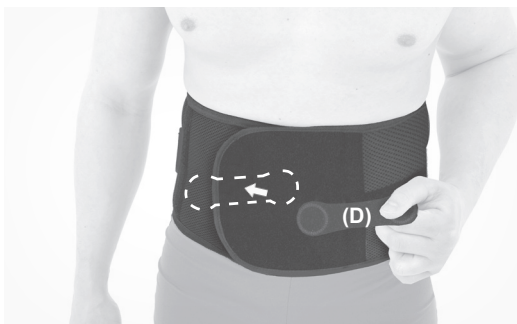

4. PL: Jeśli jest potrzeba przypnij rzep zabezpieczający (D).

EN: If necessary, fasten the Velcro fastener (D).

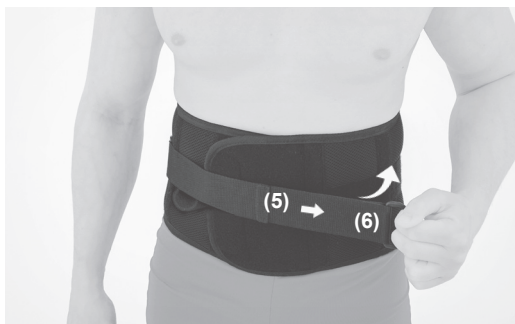

5. PL: Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu przez naciągnięcie pasa (5) za pomocą klamerki z rzepem (6) i przypnij go do przedniej części wyrobu.

EN: Set the appropriate compression of the product by tightening the belt (5) with the Velcro fastener (6) and fasten it to the front part of the product.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.