
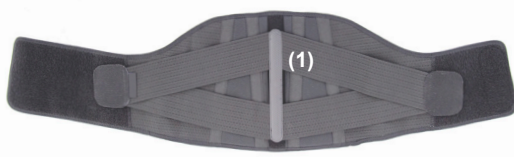


KOD KATALOGOWY	OT-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA OT-03
CODE	OT-03
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT OT-03

A. Orteza / Brace

B. Pasy dociągowe z gumy / Tension belts

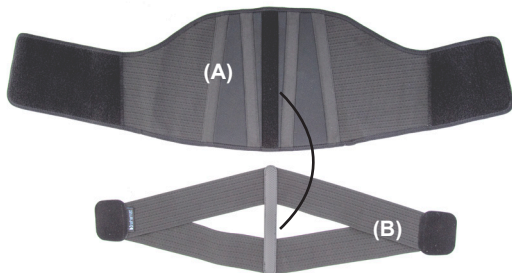

1. PL: Przypnij pasy dociągowe do wyrobu na odpowiedniej wysokości (1).

EN: Attach the tension belts to the back of the product at the appropriate height (1).



2. PL: Przyłóż ortezę w okolicę lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa i zapnij przednie zapięcie rzepowe.

EN: Place the brace on your lower back and fasten the Velcro closure.



3. PL: Zapnij pasy dociągowe.

EN: Fasten the tension belts.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.



PL: UWAGA! Wyrób można stosować bez pasów dociągowych.

EN: ATTENTION! The product can be used without tension belts.