



KOD KATALOGOWY	AM-OK/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-OK
CODE	AM-OK/CCA
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-OK

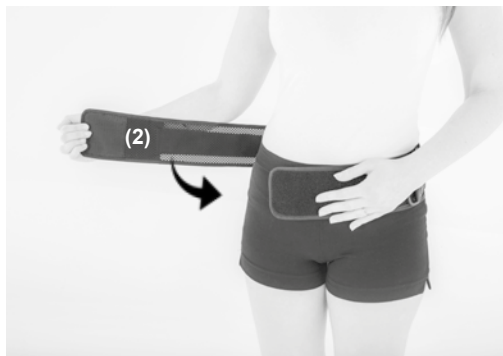

- 1. PL:** Rozepnij ortezę, przyłóż ją do odcinka krzyżowego kręgosłupa (1) i zapnij z przodu na rzep (2).
EN: Unfasten the brace, place it on the sacral spine (1) and fasten it with Velcro at the front (2).

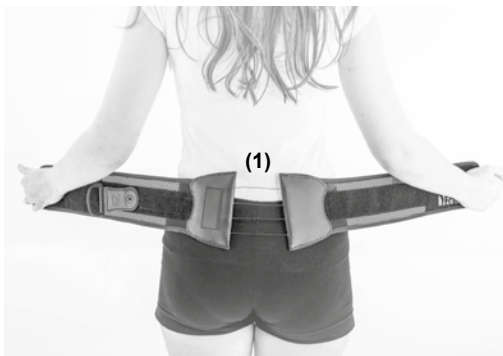

- 2. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu przez naciągnięcie linki za pomocą uchwytu z rzepem (3). Zapnij element (4) w przedniej części wyrobu.
EN: Set the appropriate compression of the product by pulling the lace using the hook and loop fastener (3). Fasten the element (4) in the front part of the product.



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.