

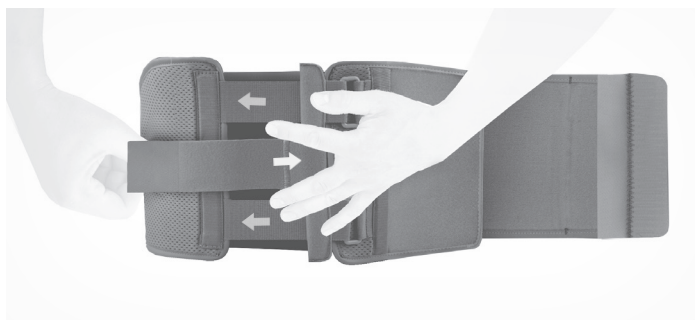
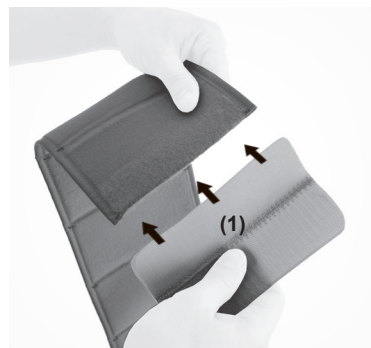


KOD KATALOGOWY	AM-TX-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-TX-02
CODE	AM-TX-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-TX-02

**1. PL:** Rozepnij zapięcie.  
**EN:** Unfasten the Velcro closure.

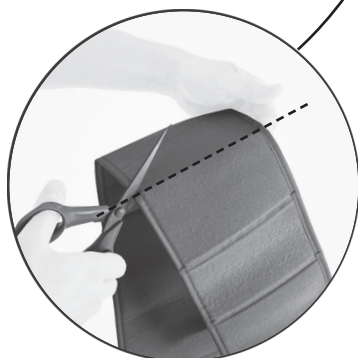

**2. PL:** Sprawdź zakres obwodu pasa i jeśli to konieczne odetnij jego zbędną długość.  
**EN:** Check the waist circumference range. If necessary, cut the needless part of the strap off.

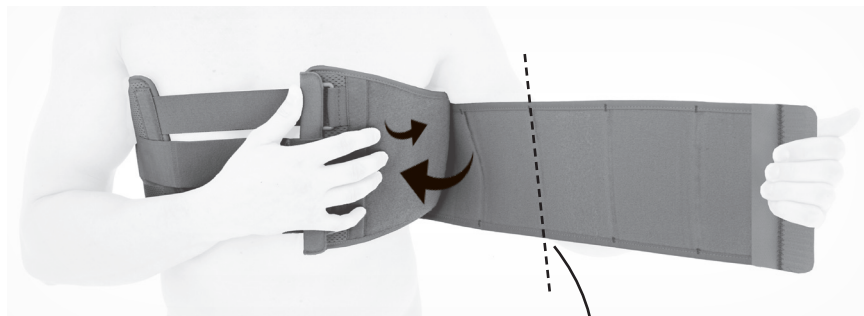

**3. PL:** Dopnij rzep zapinający (1).  
**EN:** Attach the Velcro (1).



- 4. PL:** Załóż ortezę i zapnij na rzep (2).  
**EN:** Put on the brace and fasten with Velcro (2).



- 5. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (3).  
**EN:** Set the appropriate level of compression and fasten with Velcro (3).




- 6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.



## ZMIANA OPATRUNKU CHANGE OF DRESSING

---

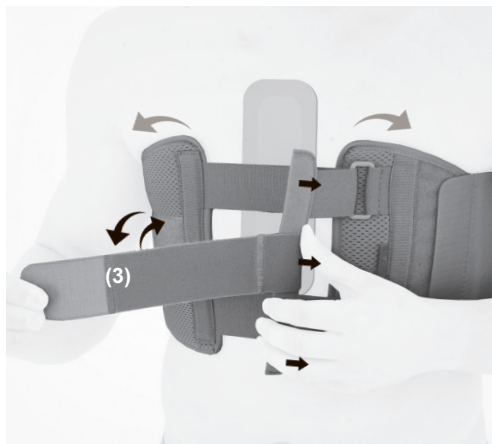

- 1. PL:** Odepnij rzep (3) i poluzuj zapięcie.  
**EN:** Release the Velcro (3) and loosen the clasp.



- 2. PL:** Wymień opatrunek.  
**EN:** Change the bandage.



- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (3).  
**EN:** Set the appropriate level of compression and fasten with Velcro (3).