


KOD KATALOGOWY	AM-PC-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PC-02
CODE	AM-PC-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PC-02

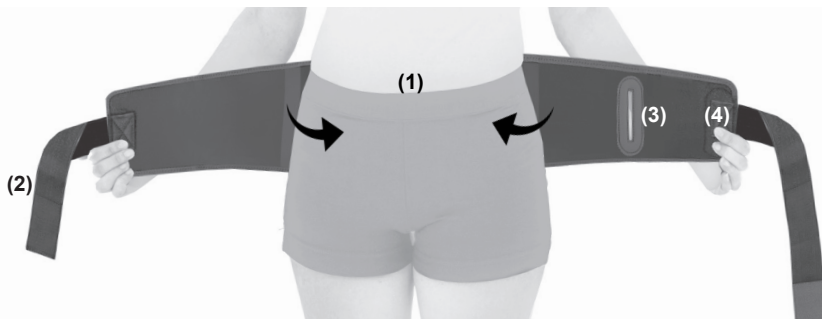

1. PL: Rozepnij ortezę, przyłóż pas w okolicy stawów krzyżowo-biodrowych (1) przepleć taśmę (2) przez otwór (3) i zapnij z przodu na rzep (4).

EN: Unfasten the brace, place the belt around the sacroiliac joints (1), interlace the tape (2) through the opening (3) and fasten it with Velcro at the front (4).



2. PL: Przepleć pas przez klamrę (5), ustaw odpowiednią kompresję i zapnij na rzep (6).

EN: Interlace the belt through the buckle (5), set the appropriate compression and fasten with Velcro (6).



3. PL: Przepleć pas przez klamrę (7), ustaw odpowiednią kompresję i zapnij na rzep (8).

EN: Thread the belt through the buckle (7), set the appropriate compression and fasten with Velcro (8).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

