





KOD KATALOGOWY	AM-PES-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PES-05
CODE	AM-PES-05
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PES-05

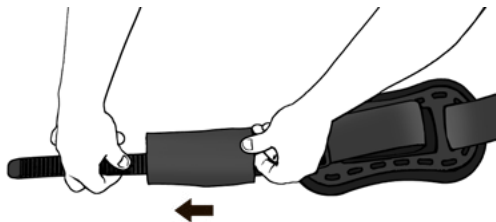


1. **PL:** Zdejmij osłonę zabezpieczającą klamry.
EN: Remove the protective cover from the buckles.

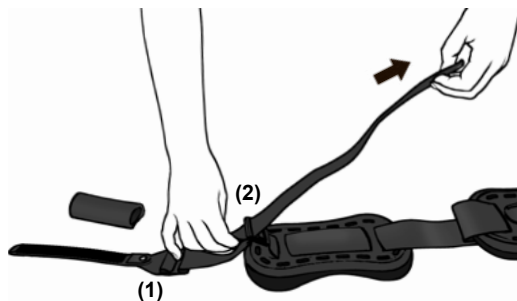


2. **PL:** Wypłść taśmę z metalowej klamry (1) i regulatora (2)
EN: Release the tape from the metal buckle (1) and regulator (2)

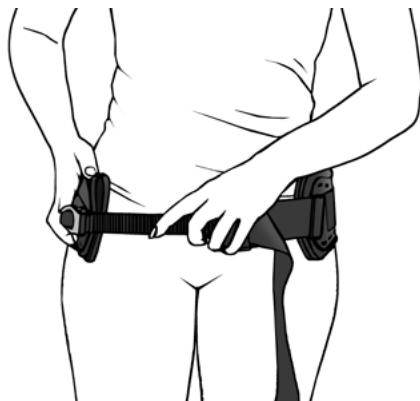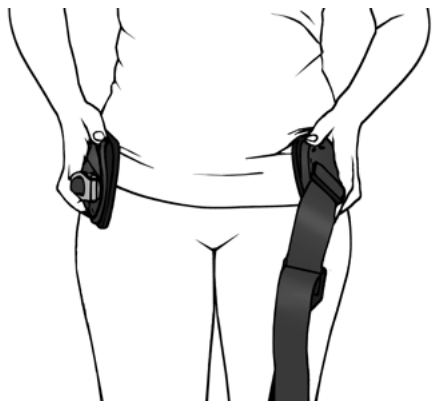

3. **PL:** Załóż i zapnij pas. Pamiętaj, że peloty powinny znaleźć się symetrycznie po przeciwnych stronach na wysokości grzebienia kości biodrowej.
EN: Put on and fasten the belt. Remember, that the pads should be placed symmetrically on the iliac crest.

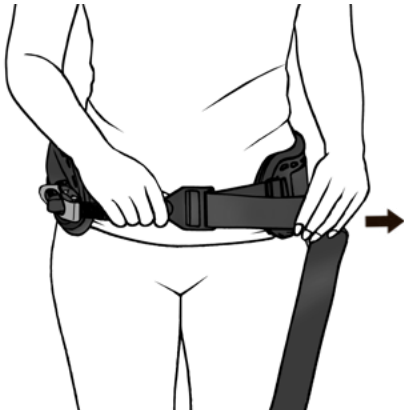


4. **PL:** Ustaw odpowiedni obwód pasa i przepleć taśmę przez regulator.
EN: Set the appropriate belt circumference and tape the strip through the regulator.

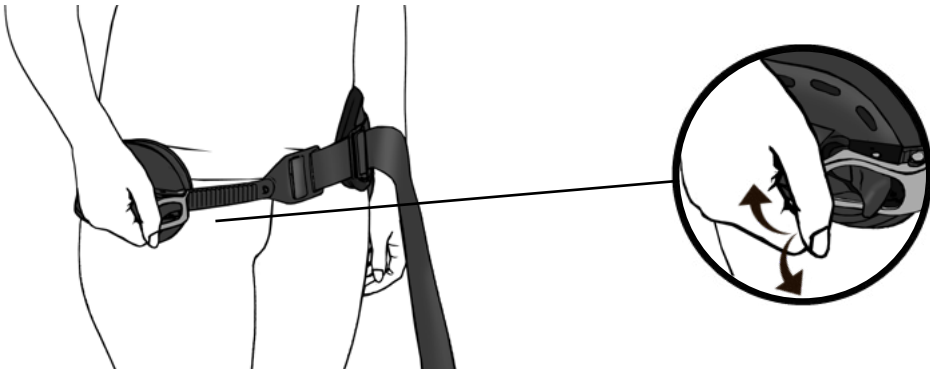


5. **PL:** Ustaw kompresję za pomocą napinacza CLIPER BUCKLE.
EN: Set the compressions using the CLIPER BUCKLE tensiometer.




6. **PL:** Rozepnij i zdejmij pas. Załóż osłonę zabezpieczającą klamrę.
EN: Release and take off the belt. Put on the cover protecting the buckle.

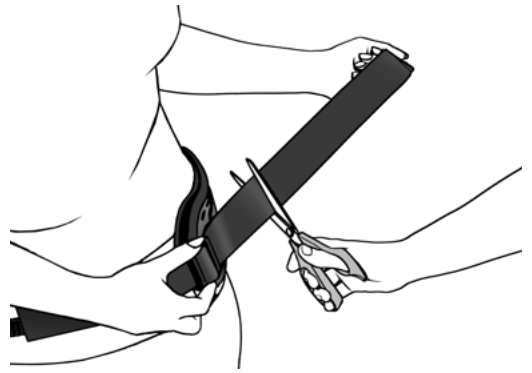

7. **PL:** Ponownie załóż pas i jeśli jest taka potrzeba odetnij zbędną długość paska.
EN: Replace the belt again and if necessary, cut off the unnecessary length of the belt.

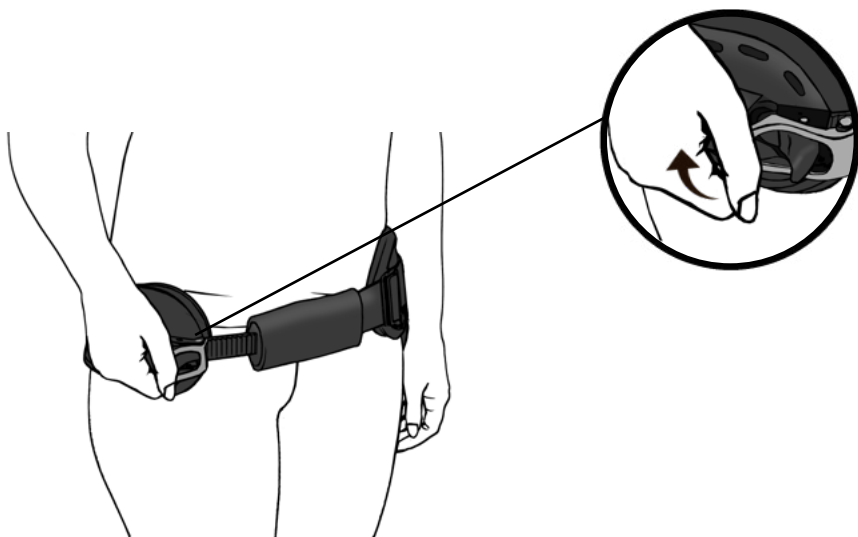

8. **PL:** Przy pomocy klamry napinającej ustaw odpowiednią kompresję i zablokuj.
EN: Use the tensioning clamp to set the appropriate compression and lock.

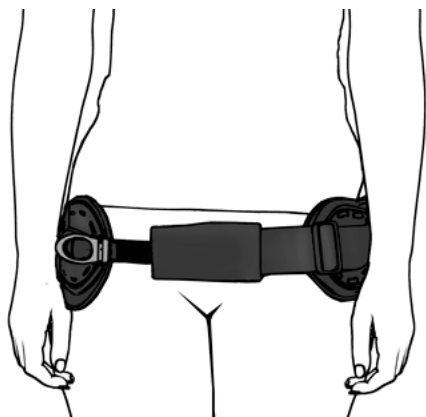

9. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.