


KOD KATALOGOWY	AS-KX-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-06
CODE	AS-KX-06
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-06

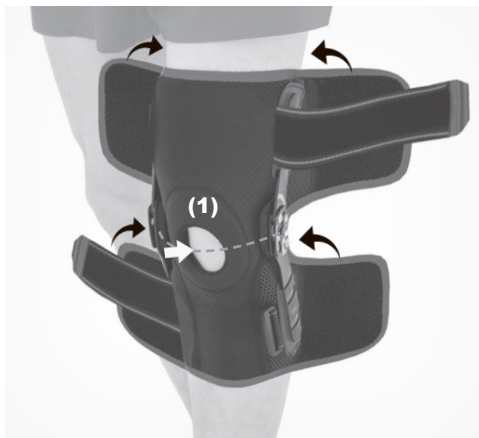

**1. PL:** Rozepnij paski i przyłóż ortezę do nogi (1) w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym, a zegary znajdowały w osi stawu kolanowego.

**EN:** Unfasten the straps and put the brace on the leg (1), so that the kneecap is in the patellar donut and the drop locks are in the axis of the knee joint.



**2. PL:** Zapnij tylne rzepy w podanej kolejności (2,3).

**EN:** Fasten the back Velcros in the order shown (2,3).



**3. PL:** Przepleć paski przez klamerki i zapnij według podanej kolejności (4,5,6,7).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro straps according to the following steps (4,5,6,7).





**4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.