



KOD KATALOGOWY	OKD-20
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-20
CODE	OKD-20
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-20

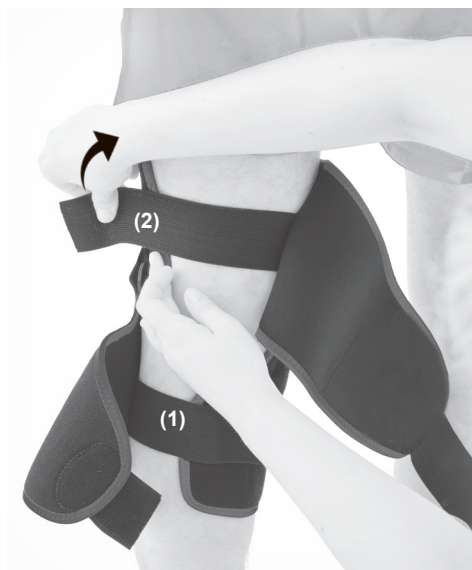

1. PL: Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym.
EN: Put the brace to your leg keeping the kneecap in the patellar donut.

2. PL: Zapnij tylne rzepy elastyczne w podanej kolejności (1) i (2).
EN: Fasten rear elastic Velcro straps as the following steps (1) and (2).

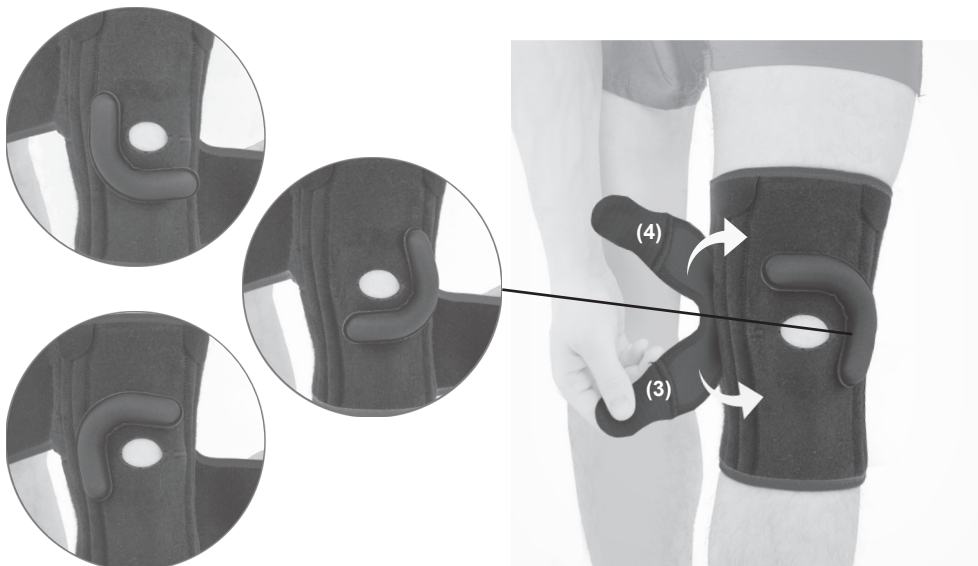

- 3. PL:** Skoryguj ustawienie rzepki za pomocą specjalnego usztywnienia (1).
EN: Correct the patellar setting with the special element (1).

- 4. PL:** Zapnij rzepy (3,4) w podanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro (3,4) according to the following steps.



- 5. PL:** Zapnij rzepy w podanej kolejności (3,4,5,6).
EN: Fasten the Velcro according to the following steps (3,4,5,6).



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.