

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z S-A
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
MODEL	AM-OSK-Z S-A
CODE	AM-OSK-Z S-A
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSK-Z S-A


1. PL: Przed założeniem ortozy, rozepnij wszystkie pasy. Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółorzepkowym (1).

EN: Before putting on the brace, unfasten all straps. Put the brace on the leg, so that the kneecap is in the patellar donut (1).



2. PL: Przepleć taśmy (2,3) przez klamki i zapnij je na rzepy.

EN: Interlace the straps (2,3) through the buckles and close them with Velcro.

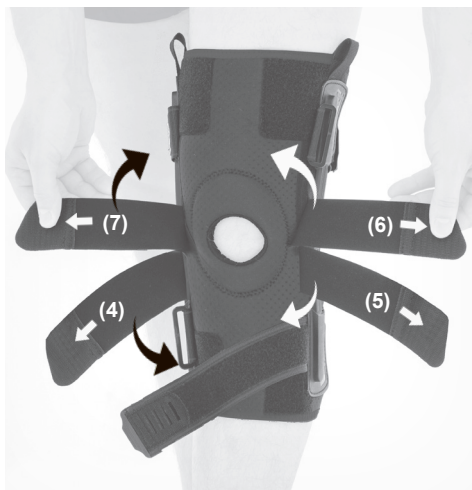

3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję dolnych i górnych pasów krzyżowych (4,5,6,7) i zapnij je na rzepy według podanej kolejności.

EN: Set the appropriate compression for the lower and upper straps (4,5,6,7) and fasten them with Velcro according to the given order.



4. PL: Przepleć taśmy (8,9) przez klamerki i zapnij je na rzepy.

EN: Interlace the straps (8,9) through the buckles and close them with Velcro.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.