



KOD KATALOGOWY	OKD-15
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-15
CODE	OKD-15
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-15

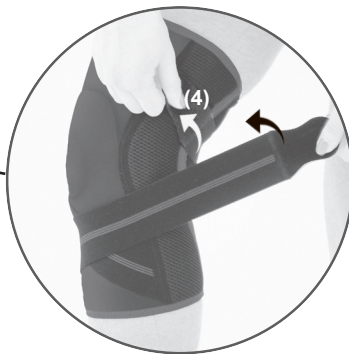

1. PL: Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w pierścieniu okolorzepekowym (1).

EN: Unfasten the straps, place the brace on the leg and pull up to keep the kneecap in the patellar donut (1).

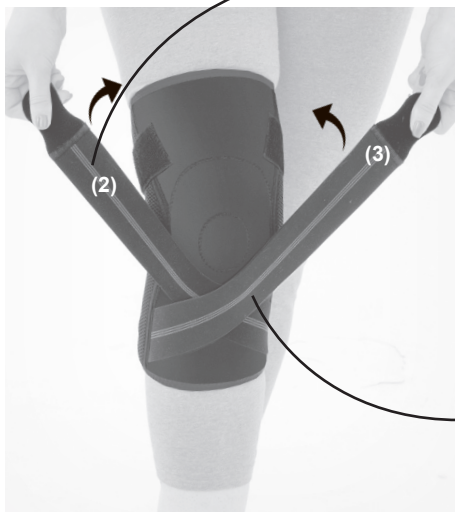

2. PL: Ustaw odpowiednią kompresję pasów krzyżowych (2,3). Skrzyżuj pasy z tyłu i zapnij na rzepy (4,5).

EN: Set the correct level of compression of the X-straps (2,3). Cross the X-straps on the back and fasten them with Velcro (4,5).



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.