


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-Z/1R
CODE	AM-OSK-Z/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-Z/1R

## A. Orteza / Brace

## B. Pasy obwodowe / Circumferential straps

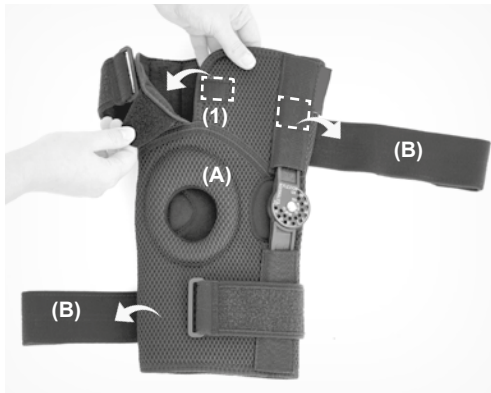

1. **PL:** Rozepnij rzep (1) i odepnij pasy (B) od rzepów.

**EN:** Unfasten the Velcro (1) and the straps (B).



2. **PL:** Załóż ortezę (A) na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka (2) znalazła się w otworze okółorzepkowym, a zegary szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

**EN:** Put the brace (A) on the leg and pull it up in such a way that the kneecap (2) is in the patellar donut and the drop locks of the splint were on the axis of the knee joint.



3. **PL:** Zapnij ortezę na rzep (3).

**EN:** Fasten the Velcro (3).



**4. PL:** Przypnij pas obwodowy (B) na rzep (4) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez klamrę i zapnij na rzep (5).

**EN:** Fasten the circumferential strap (B) with the Velcro (4) setting the appropriate compression. Interlace it through the buckle and fasten with Velcro (5).



**5. PL:** Przypnij pas obwodowy (B) na rzep (6) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez klamrę i zapnij na rzep (7).

**EN:** Fasten the circumferential strap (B) with the Velcro (6) setting the appropriate compression. Interlace it through the buckle and fasten with Velcro (7).



**PL:** **UWAGA!** Istnieje możliwość odwrócenia pasów w taki sposób, aby klamerka znajdowała się od zewnętrznej lub wewnętrznej strony kończyny, w zależności od potrzeby.

**EN:** **ATTENTION!** It is also possible to reverse the strap, so that the buckle is on the outside or inside part of the limb, depending on the need.



**6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.