


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/2RA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-Z/2RA
CODE	AM-OSK-Z/2RA
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-Z/2RA

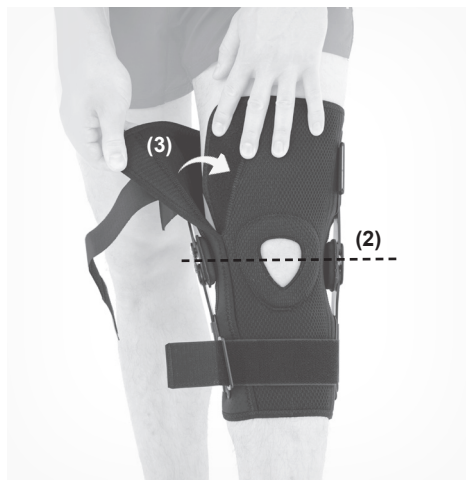

1. PL: Rozepnij ortezę. Załóż ją na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka (1) znalazła się w otworze okołorzepkowym, a zegary znajdowały się w osi stawu kolanowego (2) następnie zapnij rzep (3).

EN: Unfasten the brace. Put it on the leg and pull it up in such a way that the patella (1) is in the patellar donut and the drop locks are in the axis of the knee joint (2) then fasten the Velcro (3).



2. PL: Przepleć taśmy przez klamery i zapnij na rzepy w podanej kolejności (4,5,6,7).

EN: Intrlace the straps through the buckles and fasten the Velcros straps according to the following steps (4,5,6,7).



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.