


KOD KATALOGOWY	OKD-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-06
CODE	OKD-06
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-06



1. PL: Rozepnij ortezę i załóż ją w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym (1), a zegar szyny znajdował się w osi stawu kolanowego.

EN: Unfasten the orthosis and put it on in such a way that the kneecap is in the patellar donut (1) and the drop lock is in the axis of the knee joint.

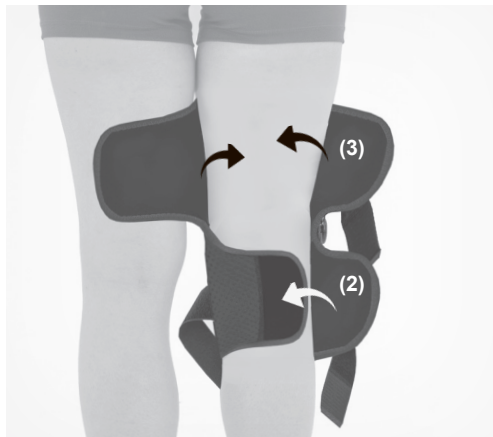

2. PL: Zapnij ortezę z tyłu na rzepy (2,3)

EN: Fasten the brace at the back with Velcro (2,3)



3. PL: Przepleć taśmy przez klamerki i zapnij w podanej kolejności (4,5,6,7).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (4,5,6,7).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.