

KOD KATALOGOWY	OKD-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-07
CODE	OKD-07
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-07



**1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym (1), a zegary szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

**EN:** Unfasten the brace and put it on the leg in such a way that the kneecap is in the patellar donut (1) and the drop locks are in the axis of the knee joint.



**2. PL:** Zapnij ortezę z tyłu na rzepy (2,3)  
**EN:** Fasten the brace at the back with Velcro (2,3)



**3. PL:** Przepleć taśmy przez klamery i zapnij w podanej kolejności (4,5,6,7).  
**EN:** Fasten the Velcro straps according to the following steps (4,5,6,7).



**4. PL:** Przeplec taśmy przez klamerki i zapnij w podanej kolejności (8,9,10,11).

**EN:** Fasten the Velcro straps according to the following steps (8,9,10,11).



**5. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.