




KOD KATALOGOWY	OKD-18
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-18
CODE	OKD-18
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-18



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż ją do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym (1).
- EN:** Unfasten the brace and put the brace to your leg keeping the kneecap in the patellar donut (1).

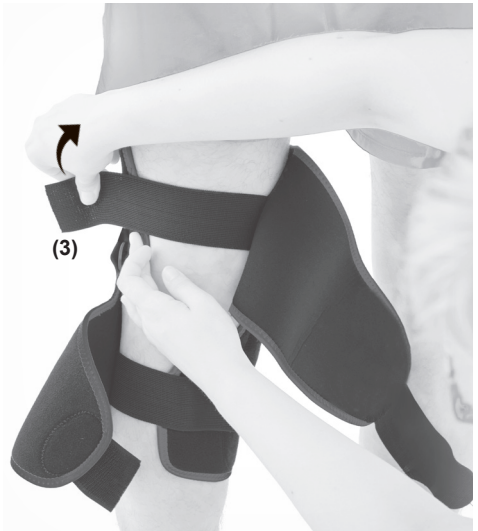

- 2. PL:** Zapnij tylne pasy stabilizujące na rzepy w podanej kolejności (2) i (3).
- EN:** Fasten the rear Velcro straps as the following steps (2) and (3).

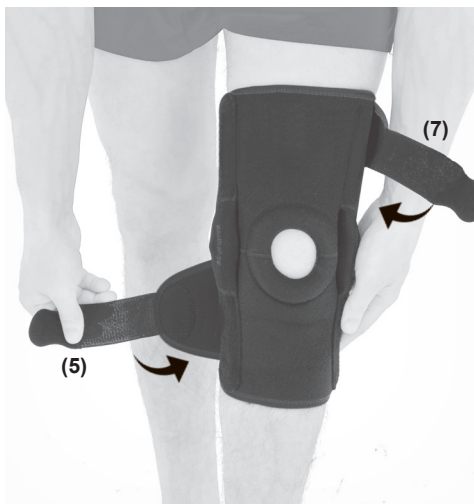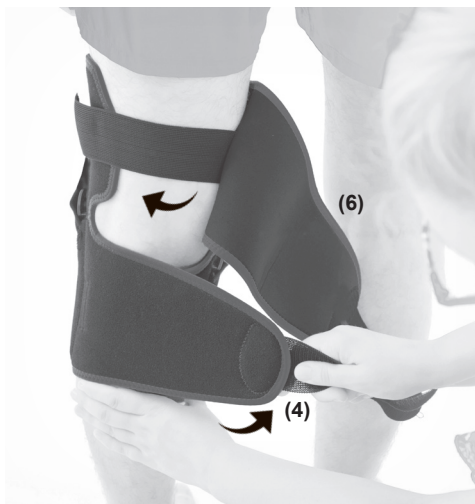

3. PL: Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (4,5,6,7).

EN: Fasten the Velcro according to the following steps (4,5,6,7).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.