



KOD KATALOGOWY	AM-OSK-O/1
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-O/1
CODE	AM-OSK-O/1
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-O/1

PL: A. Orteza
B. Paski
C. Rzepy

EN: A. Brace
B. Stripes
C. Velcros


PL: Rozepnij ortezę i usuń wszystkie przypięte elementy.

EN: Unfasten the brace and unhook all attached parts.

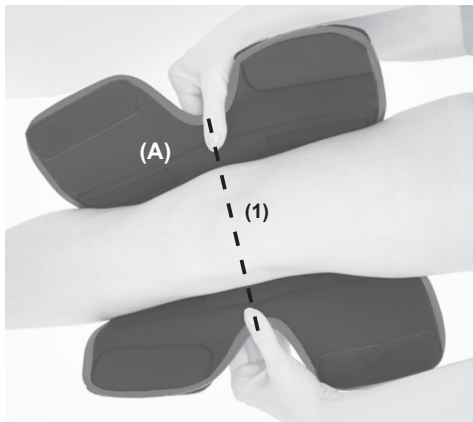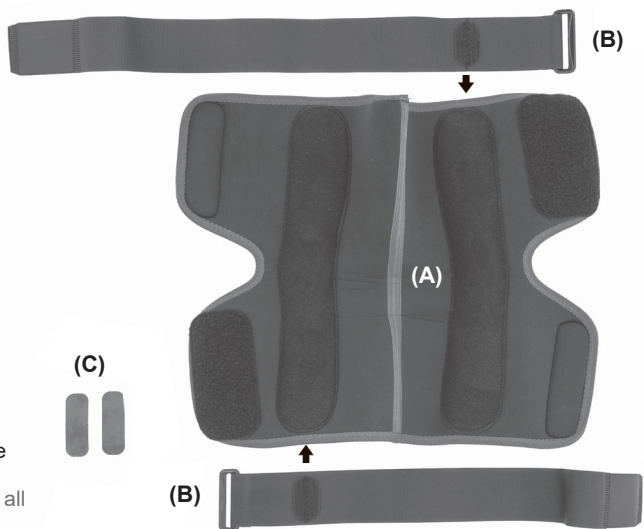


1. PL: Przyłóż ortezę (A) do nogi (1) w taki sposób, aby zawiasy szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

EN: Place the brace (A) on the leg (1) in such a way that the rail hinges are in the axis of the knee joint.

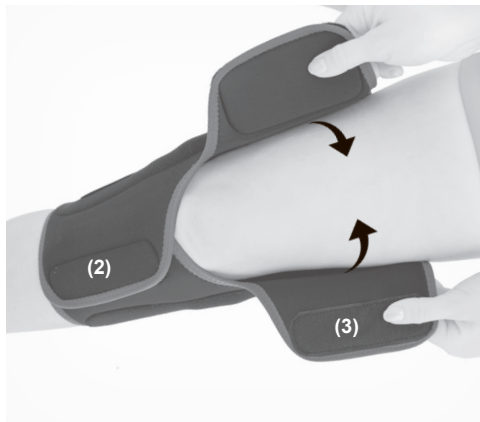

2. PL: Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (2,3).

EN: Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (2,3).

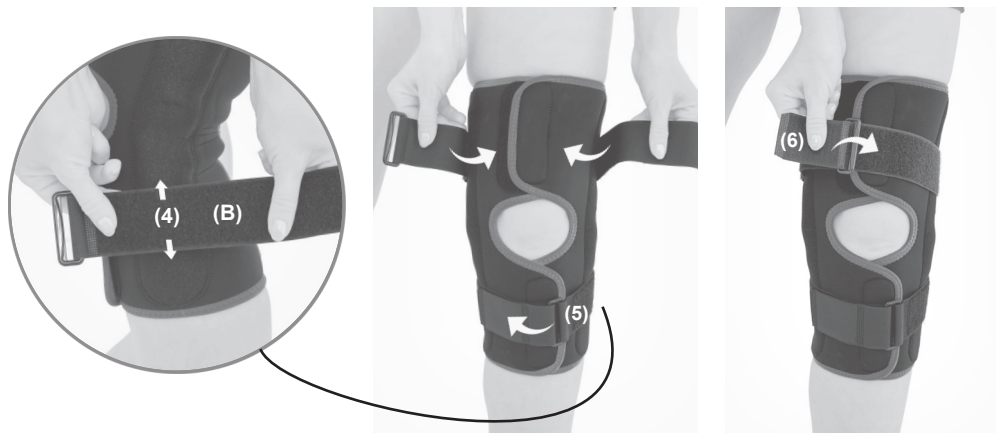

3. PL: Przypnij pasy obwodowe (B) do kanału szyny (4) na rzepy. Przepleć taśmy przez klamry i zapnij je w podanej kolejności (5,6).

EN: Attach the circumferential straps (B) to the splint channel (4) with Velcro. Interlace the straps through the buckles and fasten them in the order shown (5,6).


PL: UWAGA! Każdy z pasów obwodowych można przypiąć na wybranej wysokości, przemieszczając się w górę lub w dół po linii kanału szyny. Istnieje również możliwość odwrócenia paska w taki sposób, aby klamka znajdowała się od zewnętrznej lub wewnętrznej strony kończyny, w zależności od potrzeby.

EN: ATTENTION! Each of the perimeter straps can be attached at the desired height by moving up or down along the splint channel line. It is also possible to reverse the strap, so that the buckle is on the outside or inside of the limb, depending on the need.




4. PL: Po przeciwnej stronie klamerki zapiętej ortozy zaznacz miejsca skrzyżowania pasów obwodowych z kanałem szyny (7,8).

EN: On the opposite side of the buckles of the fastened orthosis, mark the places where the straps cross with the splint channel (7,8).

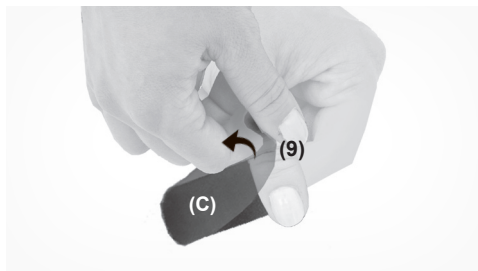

5. PL: Odklej folię zabezpieczającą (9) z rzepów (C).

EN: Peel off the protective foil (9) from the Velcro (C).

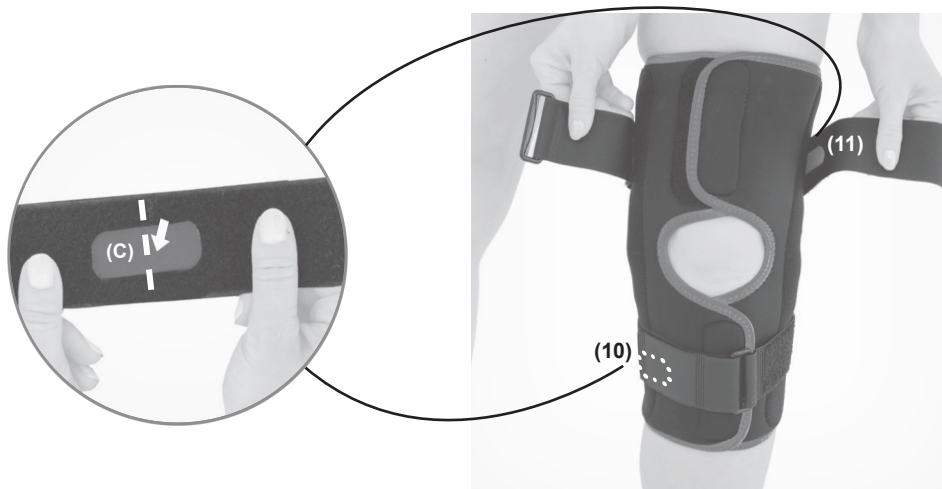

6. PL: W miejscach wcześniej zaznaczonych na pasach przyklej do ich wewnętrznej strony rzepy (C) i mocno dociśnij (10,11).

EN: In the places previously marked on the straps put the Velcro (C) and press firmly (10,11).



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.