


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-O/2
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-O/2
CODE	AM-OSK-O/2
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-O/2



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj tylne zapięcia (1).
EN: Unfasten the brace and loosen the rear fasteners (1).

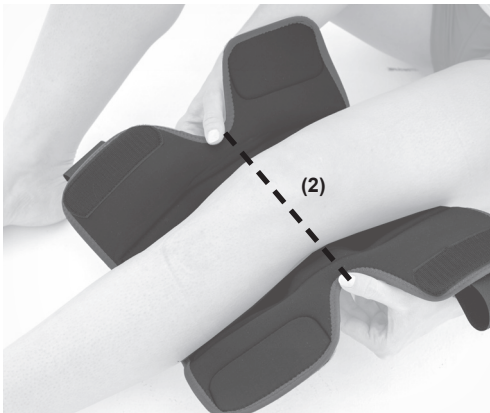

- 2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi (2) w taki sposób, aby zegary szyn znajdowały się w osi stawu kolanowego, w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.
EN: Place the brace on the leg (2) in such a way that the drop locks of the splint are in the axis of the knee joint. Only a properly worn orthosis remains in the axis of the knee joint and adheres evenly to the entire limb.



3. PL: Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (3,4).

EN: Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (3,4).



4. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij je w podanej kolejności (5,6,7,8).

EN: Interlace straps through the buckles and fasten them in the order shown (5,6,7,8).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.