




KOD KATALOGOWY	AM-OSK-OL/2R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-OL/2R
CODE	AM-OSK-OL/2R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-OL/2R

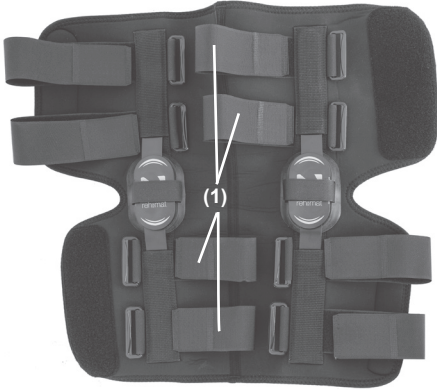

- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj tylne zapięcia (1).  
**EN:** Unfasten the brace and loosen the rear fasteners (1).

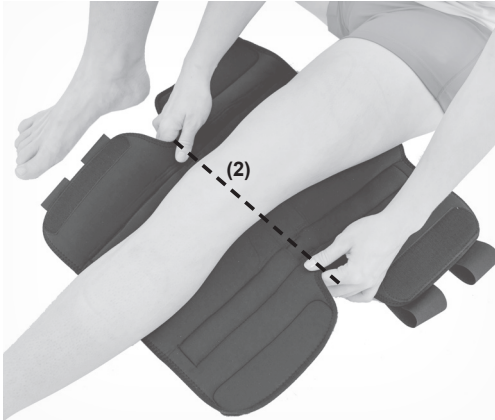

- 2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi (2) w taki sposób, aby zegary szyn znajdowały się w osi stawu kolanowego, w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.  
**EN:** Place the brace on the leg (2) in such a way that the drop locks of the splint are in the axis of the knee joint. Only a properly worn orthosis remains in the axis of the knee joint and adheres evenly to the entire limb.

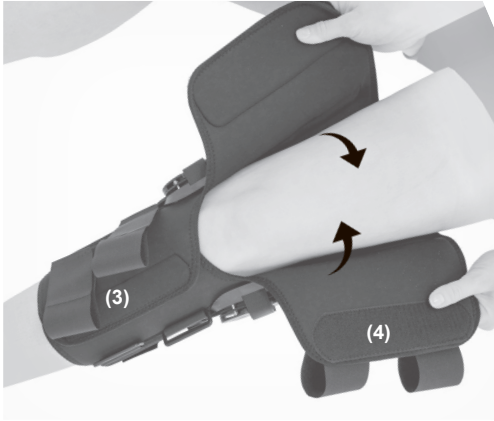

**3. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (3,4).

**EN:** Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (3,4).



**4. PL:** Przepleć taśmy tylne przez klamry i zapnij je w podanej kolejności (5,6,7,8).

**EN:** Interlace the back straps through the buckles and fasten them in the order shown (5,6,7,8).



**5. PL:** Przepleć taśmy przednie przez klamry i zapnij je w podanej kolejności (9,10,11,12).

**EN:** Interlace the front straps through the buckles and fasten them in the order shown (9,10,11,12).



**6. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.