

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/S-P
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
MODEL	AM-OSK-Z/S-P
CODE	AM-OSK-Z/S-P
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSK-Z/S-P



1. PL: Rozepnij paski i podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym (1).

EN: Unfasten the straps and pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut (1).



2. PL: Przepleć paski przez klamki i zapnij na rzepy w podanej kolejności (2,3).

EN: Interlace the strap through the buckle and fasten with Velcro in the following order (2,3).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.