

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-ZL/2R-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-ZL/2R-02
CODE	AM-OSK-ZL/2R-02
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-ZL/2R-02



1. PL: Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znajdowała się w otworze okolorzepakowym, a zegary szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego (1).

EN: Unfasten the straps, put the brace on the leg and pull it up in such a way that the kneecap is in the patellar donut and the drop locks are in the axis of the knee joint (1).



2. PL: Zapnij rzepy według numeracji (2,3).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (2,3).



3. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (4,5,6,7).


EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (4,5,6,7).





4. PL: Zapnij rzepy (8,9) według wskazanej kolejności.

EN: Fasten the Velcros closures (8,9) according to the following steps.

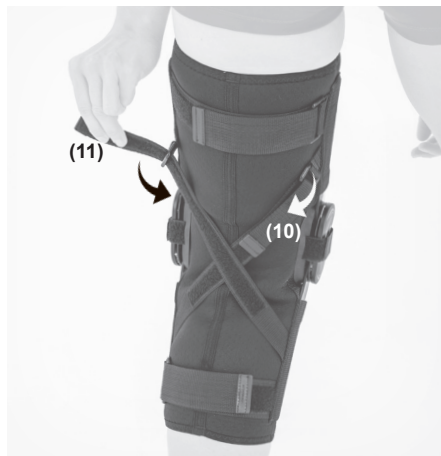

5. PL: Zapnij tylne taśmy krzyżowe na rzepy (10,11).

EN: Fasten the rear Velcro cross straps (10,11).



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

