


KOD KATALOGOWY	AS-KX-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-04
CODE	AS-KX-04
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-04




**1. PL:** Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym (1).

**EN:** Unfasten the straps, put the orthosis on the leg and pull it up, so that the patella is in the patellar opening (1).

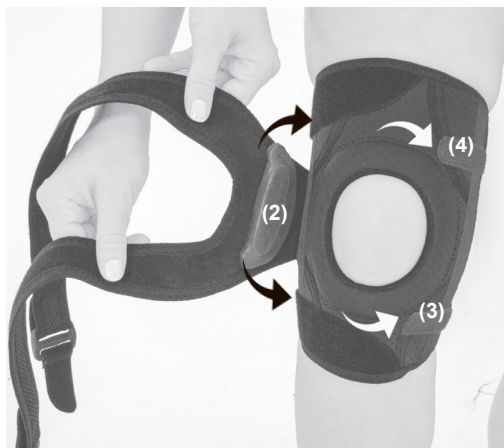

**2. PL:** Skoryguj ustawienie rzepki za pomocą silikonowego elementu (2) przypinanego na rzep. Ustaw odpowiednią kompresję pasów i przypnij je do rzepów (3,4).

**EN:** Correct the position of the kneecap using the Velcro-fastened silicone element (2). Set the appropriate compression of the straps and fasten them to the Velcro (3,4).

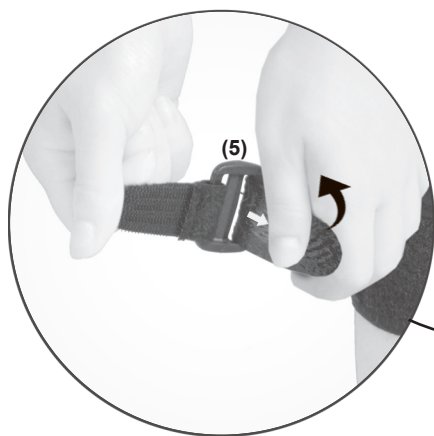

**PL:** Za pomocą regulatorów (5) dopasuj długość pasów.  
**EN:** Use the buckle (5) to adjust the length of the tapes.



**3. PL:** Zapnij pas obwodowy (6).  
**EN:** Fasten the wrap around strap (6).



- 4. PL:** Zapnij pas obwodowy (7).  
**EN:** Fasten the wrap around strap (7).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.