

KOD KATALOGOWY	U-SK-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	U-SK-01
CODE	U-SK-01
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	U-SK-01

**1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi (1) w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółorzepkowym.

**EN:** Unfasten the brace and put it on your leg (1), so that the kneecap is in the patellar donut.



**2. PL:** Zapnij rzepy w podanej kolejności (2,3,4).

**EN:** Fasten the Velcro straps in the following order (2,3,4).



**3. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.