




KOD KATALOGOWY	AM-OSS-03/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	AM-OSS-03/CCA
CODE	AM-OSS-03/CCA
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	AM-OSS-03/CCA

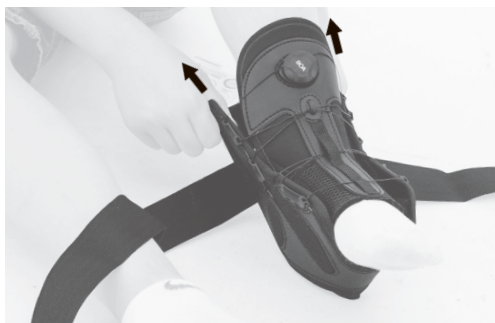

1. **PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Place the brace on the ankle.



2. **PL:** Za pomocą systemu BOA® ustaw odpowiednią siłę naprężenia.
EN: Adjust the required compression with the BOA® Fit System.

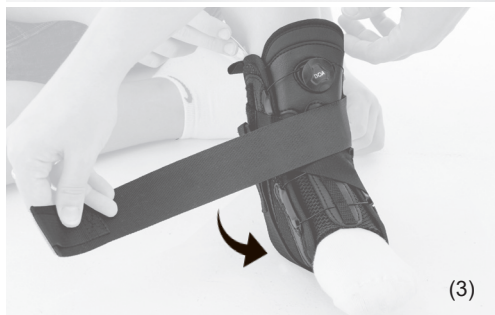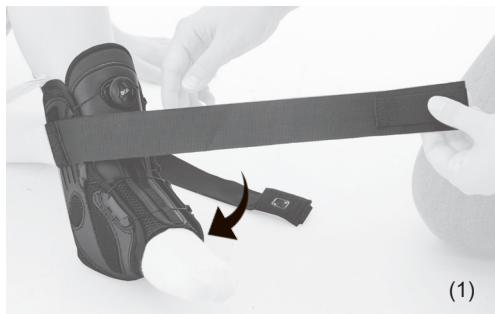

3. **PL:** Zapnij pasy ósemkowe według wskazanego kierunku (1,2,3,4).
EN: Fasten the Figure 8 straps according to the indicated direction (1,2,3,4).



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.